



THUASNE

Kompressziós terápia

VENOFLEX
LYMPHATREX
MOBIDERM
CICATREX



Tartalom

Flebológia	4
Indikációk, kezelés, termékek	
VENOFLEX Micro	
Nyiroködéma	17
Indikációk, kezelés, termékek	
MOBIDERM®	
LYMPHATREX®	
MOBIDERM® autofit	
Hegkezelés	40
Indikációk, kezelés, termékek	
CICATREX®	
Szolgáltatás	52
ARION felhúzást segítő eszközök kompressziós ruházathoz	
Általános információk	

WINGS FOR YOUR HEALTH

A THUASNE Csoport egyike a nemzetközileg legsikeresebb ortopédiai cégeknek. A tulajdonosok ötödik generációja irányítja a családi vállalkozást. Hálózatban működő kutatóközpontokat tart fenn Franciaországban, Németországban, Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban. Európában és az USA-ban saját gyártóegységekkel, valamint a kereskedelmi egységek világméretű hálózatával rendelkezik.

Ez teszi különlegessé: a THUASNE globális szereplő, ugyanakkor regionális jelenléte is van.

Minőségtudatos. Egyedi. Nemzetközi. THUASNE.

Előszó

Üdvözljük a THUASNE termékeinek világában, ahol az egyedi és méretsorozatos kompressziós öltözetek széles választékát kínáljuk. Termékeink az egészségügyi ellátás irányelvei szerint támogatják Önt a mindennapokban - és kiemelkedő kényelmi tulajdonságokkal bírnak!

Termékeink egyszerre kényelmesek, jól illeszkedőek, vizuálisan vonzóak és emellett megfelelő terápiás hatással rendelkeznek.

Büszkeségünk: évtizedes tapasztalatunk az optimális utókezelésben, mely magában foglalja a részletekre való odafigyelést, nemzetközi szinten különböztet meg minket versenytársainktól.

Azt szeretnénk, hogy termékeink minden nap meggyőzzék Önt.

A THUASNE Csapata

Kiváló design különböző termékkategóriákban



reddot design award
winner 2015



reddot design award
winner 2016





Flebológia

VÉNÁS BETEGSÉGEK KEZELÉSE


A kompressziós gyógyharisnyák terápiás alkalmazása központi elem mind a vénás betegségek, mind a nyiroködéma kezelése során. Óriási szerepe van az olyan páciensek életminőségének javításában, akik előrehaladott vénás rendellenességben, poszttrombotikus szindrómában, illetve zsír- vagy nyiroködémában szenvednek.

A körkötött kompressziós harisnyákat visszerezesség, tromboembólia, poszttrombotikus szindróma vagy trombózis megelőzés esetén ajánlják.

Krónikus vénás elégtelenség és ödéma esetén többnyire síkkötött harisnyákat javasolnak.

A kompressziós harisnyák hatásukat a lábra gyakorolt nyomás által fejtik ki. Az egyes terápiák optimális nyomási tartományát ún. kompressziós osztályokba soroljuk. A nyomás csökkenti a véráramlás keresztmetszetét, ami növeli a vér áramlási sebességét és támogatja a vénabillentyűk működését. Tehát kevesebb folyadék tud felhalmozódni a test szöveteiben. Ez elősegíti a vér visszaáramlását a szívbe, és a lábak könnyedebbek maradnak. A harisnya ezen hatását fokozza az izmok és az ízületek munkája. Ez lehetővé teszi, hogy a páciens aktívan optimalizálja a kompressziós terápiát.



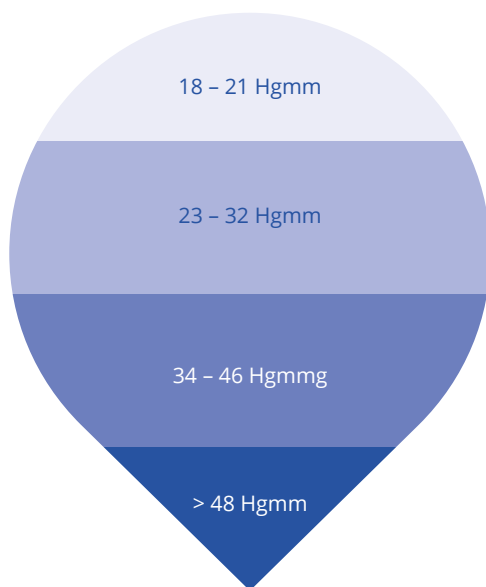

1-es kompressziós osztály
alacsony nyomás

2-es kompressziós osztály
közepes nyomás

3-as kompressziós osztály
erős nyomás

4-es kompressziós osztály
nagyon erős nyomás

Indikációk

- Fáradt vagy „nehéz láb” érzet megelőzése
- Enyhe varikózis ödéma nélkül
- Terhességi visszernesség
- Seprűvénák

- Mérsékelt vagy súlyos varikózis
- Vénás rendellenességek
- Mélyvénás trombózis után
- A mélyvénás billentyű elégtelensége

- Erős ödémásodási hajlam
- Vénás fekélyek gyógyulása után
- A mélyvénák elégtelensége

- Nyiroködéma
- Elefántiázis
- A mélyvénás rendszer súlyos károsodása



VENOFLEX

A **VENOFLEX** kompressziós harisnyák a páciensek egyéni igényeinek megfelelően készülnek. Kellemes színekben, sorozatgyártásban, plusz méretben vagy egyedi méretben állnak rendelkezésre a különböző hosszúságú zoknik, combfixek és harisnyanadrágok.

A **VENOFLEX** termék neve együtt jár a jobb minőséggel, egyértelmű méretezéssel és meggyőző tapintással. A többféle színben, standard és egyedi méretben készülő különböző harisnyák gondosan feldolgozott természetes és innovatív alapanyagokból készülnek, hogy a legjobb hatást tudják kifejteni.

A **VENOFLEX** színeinek mélysége és ragyogása lenyűgöző. Bőrbarát, könnyen kezelhető és tartós, részben azért, mert csak előfestett fonalat használunk. Egy másik előny: az előfestett fonalak méret- és színtartóbbak, mint az utólag festett harisnyák.

Tökéletes támogatás, hogy könnyű lábakon élhessen!

VENOFLEX MICRO

A **VENOFLEX Micro** egy finom szövésű kompressziós gyógyharisnya, amely tökéletesen alkalmazkodik a lábhoz. Különösen kellemes szerkezete miatt rendkívül kényelmes viseletet garantál, melyet fokozatosan csökkenő nyomása is támogat. A selymesen puha anyagnak köszönhetően a le- és felvétele a szokásosnál könnyebb és gyorsabb.

A **VENOFLEX Micro** szinte megkülönböztethetetlen a normál harisnyáktól, a viselete során láthatatlanul biztosítja terápiás hatását. A finom színválasztékkal jól alkalmazkodik a különböző öltözetekhez, és minden ruhatárhoz illik.

A **VENOFLEX Micro** a csúszásgátlók terén is rugalmasságot mutat. A vevők választhatnak a csipkés vagy göbös verziók között. Az utóbbi körkörös, bőrbarát dudorokkal tapad, melyek között tud járni a levegő és szellőzik a bőr.

A mikroszálas harisnya erős, éles Y-sarokkal, lapos varratokkal van ellátva és nyitott vagy zárt lábujjrészrel is kapható.

A **VENOFLEX Micro** funkcionális és esztétikus harisnya a divat- és egészségtudatos emberek számára - akár a terhesség alatt is.

Elegáns. Bőrbarát. Kényelmes viselet.

											
	NŐI ZOKNI						NŐI TERHES HARISNYANADRÁG				
	300 21A 18 - 21 Hgmm	•	•	•		•	300 27A 18 - 21 Hgmm	•	•	•	•
	300 21B 23 - 32 Hgmm	•	•	•	•		300 27B 23 - 32 Hgmm	•	•	•	•

		Fekete	Bézs	Karamell	Halvány bézs
	NŐI COMBFIX				
	300 23D 18 - 21 Hgmm	•	•	•	•
	300 23E 23 - 32 Hgmm	•	•	•	•

		Fekete	Bézs	Karamell	Halvány bézs
	NŐI SZÉLESÍTETT COMBFIX				
	300 23G 18 - 21 Hgmm	•	•	•	•
	300 23H 23 - 32 Hgmm	•	•	•	•

		Fekete	Bézs	Karamell	Halvány bézs
	NŐI HARISNYANADRÁG				
	300 25A 18 - 21 Hgmm	•	•	•	•
	300 25B 23 - 32 Hgmm	•	•	•	•



VENOFLEX Micro csúszásgátlók (külső, belső rész)

A **VENOFLEX Micro** csúszásgátlók csipkés vagy göbös verzióban kaphatók. A lapos varratok és a bőrbarát, lekerekített dudorok garantálják a kényelmes viseletet, ugyanakkor támogatják a combfix tökéletes illeszkedését.



VENOFLEX Micro részletek



Stabil, szegélyezett
Y sarok



Varrásmentes
szegély
nyitott lábujjal



Bőrbarát,
hypoallergén

VENOFLEX FAST

VENOFLEX FAST COTON

TERMÉSZETES PAMUT TERMÉKCSALÁD

- 36% egyiptomi pamut, az egyik legkiválóbb a világon
- Szilárd
- Puha
- Tartós (nem bolyhosodik és hypoallergén)
- Anyaga: poliamid, pamut, elasztán
- Mosógépben mosható 40 °C-on 

Milyen pácienseknek?

Akik érzékenyek az alapanyagokra
Hétköznapi viselethez
Akik kényelmes és könnyen felhúzható zoknit szeretnének

NŐI ZOKNI

		Fekete	Szürke
6120 01	15 - 20 Hgmm	●	●
6130 01	20 - 36 Hgmm	●	



FÉRFI ZOKNI

		Fekete
6129 01	15 - 20 Hgmm	●
6139 01	20 - 36 Hgmm	●



VENOFLEX FAST LIN

TERMÉSZETES LEN TERMÉKCSALÁD

- Puha tapintású kívül-belül
- Nagy rugalmasság
- Könnyen fel- és levehető a FAST technológiának köszönhetően
- A hűvös és könnyű rost szerkezet elfeledtetni, hogy zokniban van
- Letisztult és könnyű kialakítás
- Egyszerű karbantartás a mindennapi használathoz
- Anyaga: viszkóz, poliamid, len, elasztán
- Mosógépben mosható 40 °C-on 

Milyen pácienseknek?

Akik igénylik a természetes anyagokat
Hétköznapi viselethez, tavasszal és nyáron
Akik kényelmes és könnyen felhúzható zoknit szeretnének

NŐI ZOKNI

		Natúr	Fekete
6120 04	15 - 20 Hgmm	●	●



FÉRFI ZOKNI

		Natúr	Bézs	Fekete
6129 04	15 - 20 Hgmm	●	●	●



VENOFLEX FAST LAINE

TERMÉSZETES GYAPJÚ CSALÁD

- 39% Merino gyapjú
- Szigetelő és hőszabályozó
- Légáteresztő és antibakteriális
- Puha (nem okoz viszketést)
- Rugalmas és plüss-szerű
- Anyaga: poliamid, gyapjú, elasztán
- Mosógépben mosható 40 °C-on 

Milyen pácienseknek?

Akik igénylik a természetes anyagokat
Hétköznapi viselethez őszel és telen
Akik kényelmes és könnyen felhúzható zoknit szeretnének

NŐI ZOKNI

		Fekete	Antracit	Natúr
6120 02	15 - 20 Hgmm	•	•	•
6130 02	20 - 36 Hgmm			•



FÉRFI ZOKNI

		Fekete	Antilop
6129 02	15 - 20 Hgmm	•	•
6139 02	20 - 36 Hgmm	•	



VENOFLEX FAST AIR

STRAPABÍRÓ ÉS ALKALMAZKODÓ TERMÉKCSALÁD

- A rostok példátlan kombinációja minden élethez, beleértve a legszélsebbségebbeket is
- BREEZE: lágy rost frissítő hatással
- AQUARIUS: nagy teljesítményű hidrofil rost
- Szabadalmaztatott FAST technológia
- Technikai talprész
- Anyaga: poliamid, elasztán
- Mosógépben mosható 40 °C-on 

Milyen pácienseknek?

Akik igénylik a természetes anyagokat
Hétköznapi viselethez, őszel és telen
Akik kényelmes és könnyen felhúzható zoknit szeretnének

FÉRFI ZOKNI

		Fekete	Kék	Antracit
6129 03	15 - 20 Hgmm	•	•	•
6139 03	20 - 36 Hgmm	•		



Jó tudni!
FAST
Technológia

KÉNYELEM

- Szimpla bordázott szegély, exkluzív és szabadalmaztatott
- Nem az ujjvégeken, hanem felül található a varrat

KÖNNYŰ HASZNÁLAT

- Jól tágítható: könnyű le- és felvenni
- Modern színek, diszkrét minták

EGYSZERŰSÉG

- Egyszerű karbantartás, gépi mosás 40 °C-on

TOLERANCIA

- Degresszív nyomás a bokától a vádli felső végéig
- Nyújtható hosszúság: jó tartás

VENOFLEX KOKOON

KÉNYELEM ÉS PUHASÁG A KÖRBEÖLELŐ PILLANATOKHOZ

- A legszélesebb Venoflex méret- és színpaletta
- Puha hálós áttetsző mikroszálaiból
- Lapos varratok
- Megerősített sarok- és lábboltozat
- Formázott rüsz
- Anatómiai vádli forma
- A harisnya rostok antibakteriális kezelése
- Mosógépben mosható 40 °C-on 

Milyen pácienseknek?

Akik áttetsző harisnyát szeretnének viselni
Hétköznapi viselethez
Akiknek rugalmas és puha anyagra van szüksége

NŐI HARISNYA		Fekete Bézs Szürke Antilop Fekete rombuszos Kék					
5223 01	15 - 20 Hgmm	•	•	•	•	•	•
5233 01	20 - 36 Hgmm	•	•				

TERHES HARISNYANADRÁG		Fekete Bézs Fekete rombuszos		
5224 01	15 - 20 Hgmm	•	•	•

NŐI ZOKNI		Fekete Bézs Szürke Méz Antilop Fekete rombuszos Kék						
5220 01	15 - 20 Hgmm	•	•	•	•	•	•	•
5230 01	20 - 36 Hgmm	•	•					

NŐI ZOKNI VÁDLI +/-		Fekete Bézs	
5220 01	15 - 20 Hgmm	•	•

NYITOTT VÉGŰ NŐI ZOKNI		Fekete Bézs Méz		
5220 01	15 - 20 Hgmm			•
5230 01	20 - 36 Hgmm	•	•	

			Fekete	Bézs	Szürke	Méz	Antilop	Fekete rombuszos	Kék
	NŐI COMBFIX								
5225 02	15 - 20 Hgmm		●	●	●	●	●	●	●
5235 01	20 - 36 Hgmm		●	●					

			Fekete	Bézs
	NŐI COMBFIX +/-			
5225 02	15 - 20 Hgmm		●	●

			Méz
	NYITOTT VÉGŰ NŐI COMBFIX		
5225 02	15 - 20 Hgmm		●

VENOFLEX CLINIC

MEGHOSSZABBÍTOTT ÁGYNYUGALOM FÉRFIAKNAK ÉS NŐKNEK

- Biostatikus kezelés: ezüstionok mikrokapszulázása a termék gyártási folyamata során
- Olyan gyógyászati és sebészeti beavatkozásokhoz kialakított termékcsalád, ahol fennáll a vénás trombózis kockázata (fertőzés, hosszú ideig tartó ágyhoz kötöttség, daganat, műtét stb. miatt) vagy preoperatív időszakhoz



			Fehér
COMBFIX			
5815 01	10 - 15 Hgmm		●
5825 01	15 - 20 Hgmm		●



			Fehér
ZOKNI			
5820 01	15 - 20 Hgmm		●



VENOFLEX MÉRETTÁBLÁZAT

Fast Cotton, Fast Lin, Fast Laine, Fast Air és Clinic harisnyákhhoz

Női méretek (cipőméret: 36-42)

ZOKNI



	RÖVID lD < 37 cm		NORMÁL 37 cm < lD < 40 cm		HOSSZÚ lD > 40 cm	
	cB	cC -	cC	cC +		
0	16 - 19 cm	21 - 28 cm	28 - 33 cm	33 - 42 cm		
1	19 - 21 cm	23 - 30 cm	30 - 35 cm	35 - 46 cm		
2	21 - 24 cm	26 - 32 cm	32 - 38 cm	38 - 48 cm		
3	24 - 26 cm	29 - 34 cm	34 - 42 cm	42 - 52 cm		
4	26 - 29 cm	32 - 37 cm	37 - 46 cm	46 - 54 cm		
5	29 - 31 cm	36 - 43 cm	43 - 49 cm	49 - 56 cm		

COMBFIX



	RÖVID lK < 68 cm		NORMÁL 68 cm < lK < 74 cm		HOSSZÚ lK > 74 cm	
	cB	cG -	cG	cG +		
0	16 - 19 cm	35 - 42 cm	42 - 52 cm	52 - 57 cm		
1	19 - 21 cm	38 - 45 cm	45 - 54 cm	54 - 59 cm		
2	21 - 24 cm	43 - 50 cm	50 - 59 cm	59 - 66 cm		
3	24 - 26 cm	48 - 56 cm	56 - 66 cm	66 - 70 cm		
4	26 - 29 cm	51 - 58 cm	58 - 69 cm	69 - 74 cm		
5	29 - 31 cm	55 - 63 cm	63 - 74 cm	74 - 78 cm		

H. NADRÁG



	RÖVID lK < 68 cm		NORMÁL 68 cm < lK < 74 cm		HOSSZÚ lK > 74 cm	
	cB	cG	cT maxi	cH maxi		
0	16 - 19 cm	42 - 52 cm	90 cm	120 cm		
1	19 - 21 cm	45 - 54 cm	93 cm	128 cm		
2	21 - 24 cm	50 - 59 cm	96 cm	133 cm		
3	24 - 26 cm	56 - 66 cm	104 cm	145 cm		
4	26 - 29 cm	58 - 69 cm	110 cm	154 cm		
5	29 - 31 cm	63 - 74 cm	113 cm	162 cm		

TERHES HARISNYA



	RÖVID lK < 68 cm		NORMÁL 68 cm < lK < 74 cm		HOSSZÚ lK > 74 cm	
	cB	cG	cT maxi	cH maxi		
0	16 - 19 cm	42 - 52 cm	105 cm	136 cm		
1	19 - 21 cm	45 - 54 cm	105 cm	136 cm		
2	21 - 24 cm	50 - 59 cm	115 cm	145 cm		
3	24 - 26 cm	56 - 66 cm	125 cm	158 cm		
4	26 - 29 cm	58 - 69 cm	130 cm	167 cm		
5	29 - 31 cm	63 - 74 cm	135 cm	176 cm		

n 0-ás méret és «RÖVID» hosszúság, valamint +/-os zokni és harisnya és 5-ös méret csak a Venoflex Kokoon típusban kapható.

Férfi méretek (cipőméret: 38-46)

ZOKNI



	NORMÁL lD < 44 cm		HOSSZÚ lD > 44 cm			
	cB	cC -	cC	cC +		
1	19 - 21 cm	23 - 30 cm	30 - 35 cm	35 - 46 cm		
2	21 - 24 cm	26 - 32 cm	32 - 38 cm	38 - 48 cm		
3	24 - 26 cm	29 - 34 cm	34 - 42 cm	42 - 52 cm		
4	26 - 29 cm	32 - 37 cm	37 - 46 cm	46 - 54 cm		
5	29 - 31 cm	36 - 43 cm	43 - 49 cm	49 - 56 cm		

COMBFIX



	NORMÁL lK < 78 cm		HOSSZÚ lK > 78 cm			
	cB	cG				
1	19 - 21 cm	45 - 54 cm				
2	21 - 24 cm	50 - 59 cm				
3	24 - 26 cm	56 - 66 cm				
4	26 - 29 cm	58 - 69 cm				

H. NADRÁG



	NORMÁL lK < 78 cm		LONG lK > 78 cm			
	cB	cG	cT maxi	cH maxi		
1	19 - 21 cm	45 - 54 cm	100 cm	120 cm		
2	21 - 24 cm	50 - 59 cm	115 cm	135 cm		
3	24 - 26 cm	56 - 66 cm	115 cm	135 cm		
4	26 - 29 cm	58 - 69 cm	135 cm	155 cm		

Női és Férfi méretek (cipőméret: 36-46)

NYITOTT VÉGŰ ZOKNI



	NORMÁL lD < 40 cm		HOSSZÚ lD > 40 cm			
	cB	cC				
1	17 - 19 cm	30 - 35 cm				
2	19 - 22 cm	32 - 38 cm				
3	22 - 25 cm	34 - 42 cm				
4	25 - 29 cm	37 - 46 cm				
5	29 - 31 cm	43 - 49 cm				

NYITOTT VÉGŰ HARISNYA



	NORMÁL lK < 74 cm		HOSSZÚ lK > 74 cm			
	cB	cG				
1	17 - 19 cm	45 - 54 cm				
2	19 - 22 cm	50 - 59 cm				
3	22 - 25 cm	56 - 66 cm				
4	25 - 29 cm	58 - 69 cm				
5	29 - 31 cm	63 - 74 cm				

n csak 15-20 Hgmm


VENOFLEX MÉRETTÁBLÁZAT

Venoflex Micro harisnyákhhoz

Mérési hely	I	II	III	IV	V	VI
cT	59-70	66-80	76-85	82-90	88-95	92-105
cH	85-105	90-110	95-115	100-120	105-125	110-130
cG w. sb+	49-57	53-62	57-67	61-72	65-77	69-81
cG w. sb	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68
cG	43-57	45-62	49-67	53-72	56-77	60-81
cF	39-52	41-56	44-60	47-65	50-69	53-73
cE	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51
cD	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48
cC	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49
cB1	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39
cB	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30
cY	26-31	28-33	29-35	31-37	32-38	33-40
cA	17-22	19-24	21-26	23-29	25-32	27-34
Lábméret	Harisnya méret szerint					
Hosszúság	AD		AG		AT	
Rövid	34-39		60-69			
Normál			70-80		65-75	
Hosszú			81-90			

A körméretek cm-ben értendők.

Jelmagyarázat

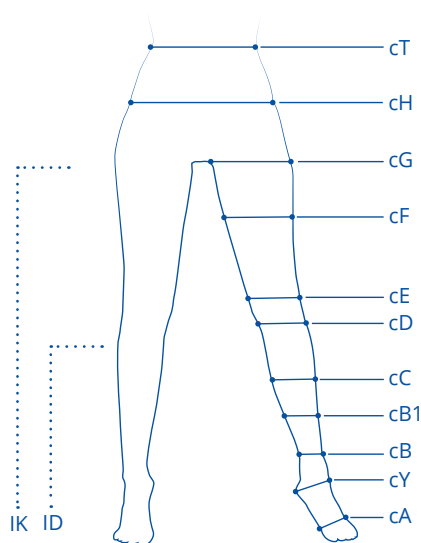

ID: A padlótól a térdig terjedő hosszúság (a térdhajlat alattig mérve, hátul)

IK: A padlótól az ágyéig terjedő hosszúság

cT: Derék körméret

cH: Körméret a fenék közepénél

cG: Combkörméret

cF: Körméret a combközépnél

cE: Térdkörméret

cD: Körméret a térd alatt

cC: Vádlkörméret

cB1: Körméret a vádli és a boka között

cB: Bokakörméret a legkeskenyebb részen

cY: Körméret a rüsztnél a sarkon keresztül

cA: Körméret a lábközépcsontok fejénél





NYIROKÖDÉMA

NYIROKÖDÉMA KEZELÉS

A nyirokrendszer szállítja el a szövetekben felhalmozódott valamennyi anyagot. Ezek a nyirokerek által szállított anyagok a következők: fehérjék, víz, sejtek és zsír: a „nyirokfolyadék”. A vérrendszerrel ellentétben a nyirokrendszer fél-keringési rendszer, amely a kulcscsont tájékán csatlakozik be a véráramba. Mindkét érrendszer együtt fontos tisztítási munkát végez a szervezetünkben.

Több ezer ember szenved a nyirokrendszer károsodásától vagy sérülésétől. Az okok sokrétűek lehetnek: genetikai hajlam, baleset vagy műtétek is kiválthatják az ödémát. Például számos emlődagánatos betegnél fennáll a mellkasi ödéma kialakulásának veszélye.

ÖRÖKLÖTT VAGY SZERZETT – AZ ELSŐDLEGES VAGY MÁSODLAGOS NYIROKÖDÉMA KÖZTI KÜLÖNBSÉGEK

Elsődleges nyiroködéma: Az elsődleges nyiroködéma veleszületett. Ez azt jelenti, hogy az ok magában a nyirokrendszerben rejlik. Önmagában korlátozott kapacitással rendelkezik a keletkező nyirokanyagok elszállítására.

Másodlagos (szerzett) nyiroködéma: A másodlagos nyiroködéma külső hatás révén alakul ki, például sérülés vagy műtét miatt. A másodlagos nyiroködéma nagyon gyakori oka a nyirokcsomók sebészeti eltávolítása, pl. emlőműtét után. Néha a nyiroködéma csak néhány évvel a sérülés után alakul ki, a nyirokrendszer hosszantartó túlterheltsége miatt.

A **zsírödéma** esetében a kompresszió segít az ödéma szabályozásában és ezáltal a szöveti fájdalom csökkentésében. A vénák és a nyirokelvezetés megelőző jellegű támogatása segít megakadályozni a zsír-nyiroködéma kialakulását. A zsírödéma a test zsíreloszlásának patológiás, valószínűleg örökölt rendellenessége. Feltehetőleg a pubertás alatti vagy utáni, a terhesség vagy a változókori során bekövetkező hormonális változások idézhetik elő. A testben bekövetkezett vizuális változásokon kívül az érintettek gyakran tapasztalnak fájdalmat, nyomásérzékenységet és erős zúzódási hajlamot.


Terápia: A kompressziós nyomás támogatja a nyirokrendszert, különösen a nyirok felszívódását és elszállítását. Az izompumpa és az artériás pulzushullám hatásai erősödnek.

Termékek: Az anyagok masszírozó hatást fejtenek ki: elősegítik az optimális mikrokeringést és ezáltal serkentik a nyirokelvezetést. A komplex ödéma-mentesítő fizioterápia első fázisában alkalmazott fáslizáshoz képest saját maga veheti föl és le az egyedi méretre gyártott kompressziós öltözetet.

KEZELÉS

A komplex ödéma-mentesítő fizioterápia (KÖF) két fázisra oszlik:

1. fázis (KÖF 1): Napi **manuális nyirokdrenázs (MLD)** két-három héten keresztül aktiválja a nyirok áramlását a még működő nyirokerekben, és így segít a kiürítésben. Könnyebb esetekben ezt a kezelést járóbeteg alapon lehet végezni, súlyosabb betegség esetén nyirokdéma kezelő központban való tartózkodás ajánlott. A manuális nyirokdrenázst követően kompressziós terápiával támogatják az eredményt: a folyamatos külső nyomás lehetővé teszi a nyirokfolyadék és alkotórészeinek visszafolyását a nyirokerekbe és a vénákba.

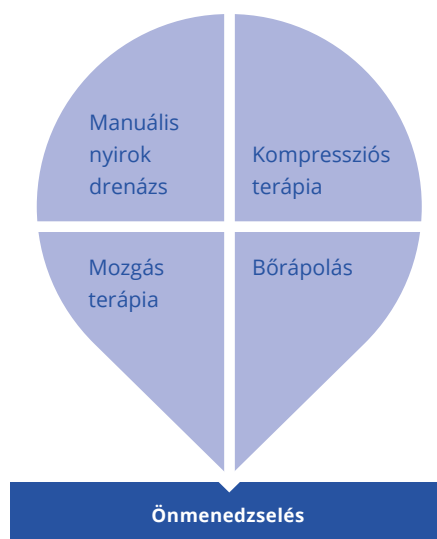

E szakasz végén vesznek méretet a kompressziós ruházatokhoz, pl. harisnyához, karharisnyához vagy kabáthoz.

2. fázis (KÖF 2): Ez a fázis az első fázis során elért állapot stabilizálásával foglalkozik. A manuális nyirokdrenázusra már nem olyan sűrűn van szükség, és az egyedi gyártású kompressziós öltözet, mint az első fázis fáslizása, „nyomásmegőrző”-ként működik.

Eddig bemutattuk a komplex ödéma-mentesítő fizioterápia két pillérét. Ez a kombinált kezelés még két kiegészítéssel jár, nevezetesen a bőrápolással és a testmozgással.

A **bőrápolás** nagyon fontos, mert a bőr hajlamos meggyűrődni, ahol a felgyülemelés van. A kidörzsölődés, a testhő és az izzadság ezután a gombák és

egyéb baktériumok ideális táptalajául szolgál. A fertőzések és a gyulladás megelőzése érdekében a bőrt speciális bőrápolási termékekkel kell kezelni, hogy a bőrgátat épen tartsa, és a baktériumok és más kórokozók ellen felvegye a harcot.

A **mozgásterápia** a KÖF negyedik építőköve. Már az első fázisban el kell kezdeni a gyakorlatokat, naponta 2-3 alkalommal. A gyakorlatokat mindig kompressziós fásliban vagy kompressziós öltözetben kell végezni, mivel a mozgás lehetővé teszi a kompresszió hatásának optimális kifejtését: ami fokozottan hozzájárul a szövet ödémamentesítéséhez.

Önmenedzselés: Ödémával a mindennapi élet sok esetben jelent kihívást. Korlátozott mobilitás, fájdalom és olyan napi rutin, amelyet az ödémával kapcsolatos teendők határoznak meg. Ezért fontos e kihívásokkal szembenézni: odafigyelni a testre, és figyelni a változásokat. A következő tippek hasznosak a test és a lélek számára, és segítenek a helyzet nyílt kezelésében.

- Viseljen kényelmes ruházatot, mely nem szorítja el (pl. gumiszalag nélküli zoknit, kellően széles pántú melltartót stb.).
- Viseljen kényelmes, nem túl hegyes orrú és legfeljebb közepesen magas sarkú cipőt.
- Kerülje a szoros gyűrűket vagy órát az érintett karon.
- Figyeljen a kiegyensúlyozott étrendre.
- Válasszon „kíméletes” sportokat: a túrázás, az úszás, a gyaloglás, a vízben futás vagy hasonló mozgások mind támogató mozgásformák.
- Táplálja bőrét rendszeresen nem irritáló és gyorsan felszívódó hidratáló termékekkel.
- A szabadban tartózkodjon inkább a hűvösebb, árnyékosabb helyeken a közvetlen napsütés helyett.
- A vérnyomásmérést és a vérvételt a lehetőségekhez képest mindig az egészséges testrészen végeztesse.
- Védekezzen a sérülések ellen, például kertészkedés vagy mosogatás közben, védőkesztyű használatával.
- Kerülje a túlzott fizikai vagy pszichés megterhelést.
- Védekezzen a rovarcsípések ellen!
- Ügyeljen a kompressziós ruházat megfelelő illeszkedésére.

CSÖKKENTŐ FÁZIS

BŐRVÉDELEM



Rövid megnyúlású pamut fásli

Rugalmatlan, ödéma elleni fásli

Cső alakú fásli. Anyaga 100% pamut.

Szélesség	Hosszúság	Szín	Termékkód
11 cm	4 m	fehér	01010101140000



Alábélelő habfásli

Vékony, rugalmas habszivacs fásli

A bőrfelület védelmére, tapadó fáslik alatt.

Szélesség	Hosszúság	Szín	Termékkód
7 cm	27 m	fehér	5507 091 000

RÖGZÍTÉS



Biflexideal®

Rövid megnyúlású, rugalmatlan kompressziós fásli

65% megnyúlás 45 cN/cm erővel.

Szélesség	Hosszúság	Szín	Termékkód
3 cm	5 m	fehér	11000200350000
6 cm			11000200650000
8 cm			11000200850000
10 cm			11000201050000



Biplast

Öntapadós kompressziós fásli

Halszájkás öntapadó felület. Többirányú tapadás a fásli szélein. Rugalmas és állítható.



Szélesség	Hosszúság	Szín	Termékkód
3 cm	2,5 m	fehér	2000 01
6 cm			
8 cm			
10 cm			
15 cm			
20 cm			


ELASZTIKUS FÁSLIK

Fokbeosztásos Biflex+ és Biflex Epi

Közepes megnyúlású, elasztikus fásli felhelyezési útmutatóval (fokbeosztással)

Két irányban rugalmas fásli.

A kifejtendő nyomás precíz szabályozása a felhelyezési útmutató segítségével (a fásli megnyúlását jelző fokbeosztással).

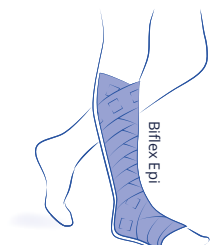

Verziók:

- BIFLEX 16+ (mérsékelt) - BIFLEX 17+ (erős)
- BIFLEX EPI 16+: 8 cm széles, 7 m hosszú a 8-as fáslizás könnyű alkalmazásához




Modell	Szélesség	Hosszúság	Szín	Termékkód
Biflex 16+ Light	8 cm	3 m	Bézs	1600 02
		3.5 m		
		4 m		
		5 m		
		3 m		
Biflex 17+ Strong	10 cm	3.5 m	Bézs	1700 02
		4 m		
		5 m		
		3 m		
		3.5 m		
Biflex 16+ Light	8 cm	4 m	Bézs	1600 02
		5 m		
		3 m		
		4 m		
		5 m		



BIFLEX FELHELYEZÉSE KÉT EGYSZERŰ LÉPÉSBEN

1 NYÚJTÁS

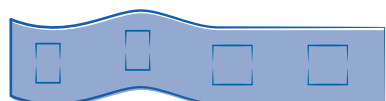


Téglalap

Négyzet


2 ÁTFEDÉS

Biflex 16+

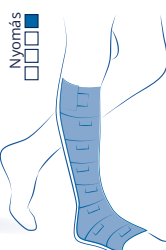


Fél-négyzet
átfedése

Biflex 16+

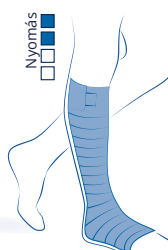

Teljes-négyzet
átfedése

Biflex 17+

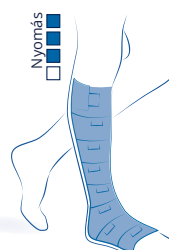

Fél-négyzet
átfedése

ELASZTIKUS FÁSLIK

Biflex+ Pratic

Közepes megnyúlású fokbeosztásos elasztikus fásli talpallóval
Rendkívül könnyű felhelyezés (a talpallónak köszönhetően).








Modell	Szélesség	Hosszúság	Szín	Termékkód
Biflex 16+ Pratic Light	8 cm	3 m	Bézs	1600 03
		4 m		
	10 cm	3 m	Bézs	
		4 m		
Biflex 17+ Pratic Strong	10 cm	3 m	Bézs	1700 03
		4 m		



PRATIC TALPALLÓ

Könnyű használat. Beteg autonómia. Családtagok segítségével könnyen felhelyezhető. Időmegtakarítás az otthoni vagy kórházi gondozók számára.

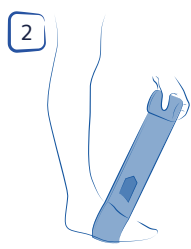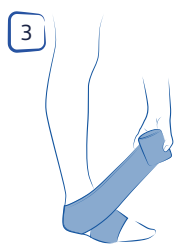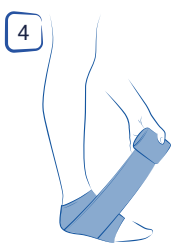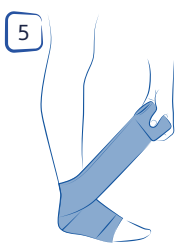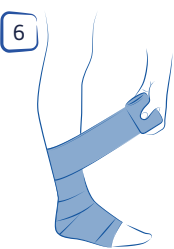- 
Bújtassa lábát a talpallóba
- 
A varrás a lábfej közepén helyezkedjen el
- 
Első fordulat a saroknál
- 
Második, rögzítő fordulat alulról
- 
Harmadik, rögzítő fordulat felülről
- 
Körkörös fáslizás

BIFLEX KIEGÉSZÍTŐK



Velcro záróelem

Kiszerezés	Termékkód
x 4 db	5903 091 000

Elastic záróelem

Kiszerezés	Termékkód
x 4 db	5902 091 000

KIEGÉSZÍTŐK

Habszivacs fásli

Emulgált latex habszivacs

A rugalmas kompressziós kezelés optimalizálása az anatómiai eltérések kiegyenlítésével.

A ferdére vágott szél lehetővé teszi a fásli tekeréskor az átlapolást, anélkül, hogy a kötés túl vastag lenne.

Légáteresztő, csökkenti a seb befüledésének kockázatát.




Vastagság	Szélesség	Hosszúság	Termékkód
8 mm	8 cm	1 m	5308 091 100
	10 cm		5310 091 100
12 mm	10 cm	1 m	5410 091 100

Varico

Latex alábélelő szivacs

Az elastikus kompressziós kezelés optimalizálására, valamint az anatómiai eltérések kiegyenlítésére. Szellőző, csökkenti a sebirritáció kockázatát.

Modell	Méret	Kiszerelés	Termékkód
0	63 mm x 87 mm	x2 db	5200 091 000
1	70 mm x 132 mm	x1 db	5200 091 100
2	125 mm x 164 mm	x1 db	5200 091 200
3	200 mm x 250 mm	x1 db	5200 091 300

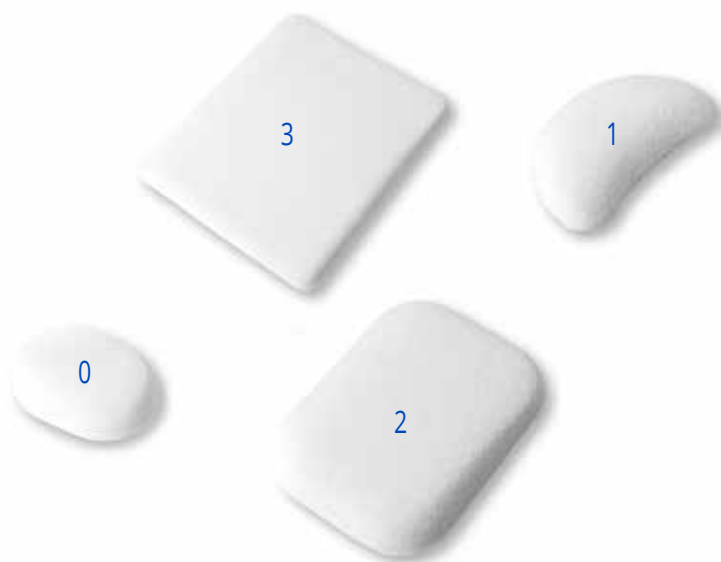

FENNTARTÓ FÁZIS

Nappali kezelés

VENO ELEGANCE


Méretszorozatos, körkötött, varrás nélküli kompressziós karharisnya.

Milyen pácienseknek?

A VENO Elegance karharisnyát a csökkentő fázist követően a fenntartó fázisban alkalmazzák a nyiroködéma kezelésére.

A termékcsaládot azoknak a pácienseknek ajánljuk, akik:

- a nyiroködéma korai vagy enyhe stádiumában vannak kevés térfogat növekedéssel
- átlagos morfológiával rendelkeznek, bőrredők nélkül

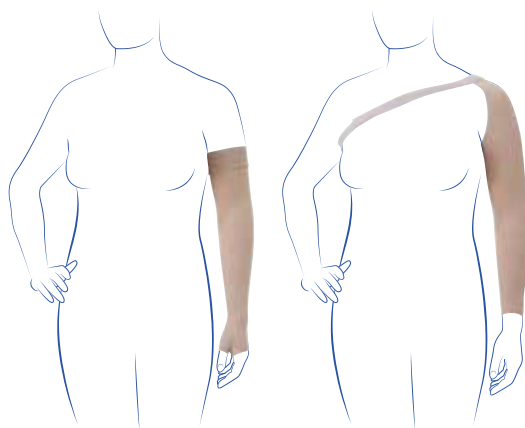

Jellemzők:

Anyagösszetétel: poliamid mikroszál, elasztán

Szín: bézs

Kompressziós osztály: 2. osztály (23 - 32 Hgmm)

Hatásmechanizmus:

Kompresszió: a nyirokkeringés javításához és az ödéma kialakulásának megelőzéséhez

Méret táblázat:

	S	M	L
cG	25 - 29.5 cm	30 - 35.5 cm	36 - 42 cm
cF	23 - 26.5 cm	27 - 31 cm	31.5 - 36 cm
cE	21 - 24.5 cm	25 - 28.5 cm	29 - 33 cm
cD	20 - 23.5 cm	24 - 27.5 cm	28 - 32 cm
cC1	13.5 - 16 cm	16.5 - 19 cm	19.5 - 22.5 cm
cC	13 - 15.5 cm	16 - 18.5 cm	19 - 22 cm

Rövid

LG	38 - 44 cm	40 - 46 cm	42 - 48 cm
-----------	------------	------------	------------

Hosszú

LG	42 - 48 cm	44 - 50 cm	46 - 52 cm
-----------	------------	------------	------------

cG: Körméret a hónalj vonalában a felkaron

cF: Körméret a bicepsz legszélesebb részén


cE: Körméret a könyökhajlatban

cD: A csukló és a könyök közti hossz felénél mért körméret

cC1: Csukló körméret



cC: Csukló körméret a legkeskenyebb részen

LG: A csuklótól a bicepszig terjedő hosszúság

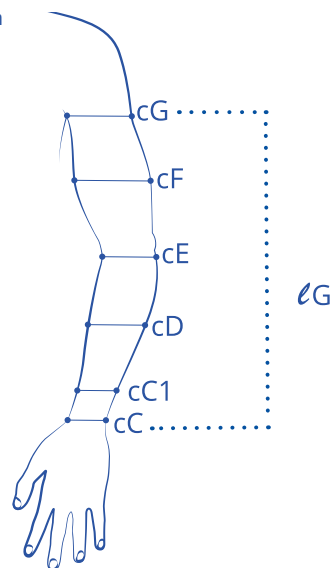

Termékkódok:

Karharisnya és karharisnya ujjatlan kesztyűvel
2. kompr. oszt. (23 - 32 Hgmm)

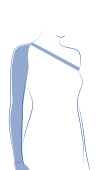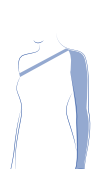	MODELL	RÖVID TERMÉKKÓD	HOSSZÚ TERMÉKKÓD
	Karharisnya csúszásgátlóval		
	S	2002D221102561	2002D221102563
	M	2002D221202561	2002D221202563
	L	2002D221302561	2002D221302563
	Karharisnya ujjatlan kesztyűvel és csúszásgátlóval		
	S	2002D221102551	2002D221102553
	M	2002D221202551	2002D221202553
	L	2002D221302551	2002D221302553
	Karharisnya váltokkal - JOBB		
	S	2002E220102561	2002E220102563
	M	2002E220202561	2002E220202563
	L	2002E220302561	2002E220302563
	Karharisnya váltokkal - BAL		
	S	2002F220102561	2002F220102563
	M	2002F220202561	2002F220202563
	L	2002F220302561	2002F220302563
	Karharisnya ujjatlan kesztyűvel és válltokkal - JOBB		
	S	2002E220102551	2002E220102553
	M	2002E220202551	2002E220202553
	L	2002E220302551	2002E220302553
	Karharisnya ujjatlan kesztyűvel és válltokkal - BAL		
	S	2002F220102551	2002F220102553
	M	2002F220202551	2002F220202553
	L	2002F220302551	2002F220302553



NYIROKÖDÉMA

MOBIDERM®

KÖF 1. KEZELÉSI SZAKASZ

A **MOBIDERM®** két gyapjúfásli közé helyezett habszivacs kockákból álló orvostechnikai eszköz. A **MOBIDERM®** (lap vagy fásli) kompressziós fásli vagy öltözet alatt a kötőszövet mobilizálására alkalmazható. A habszivacs kockák támasztófelülete és a környezete közötti nyomáskülönbség javítja a nyirokelvezetést és növeli az elvezetés hatékonyságát.

A **MOBIDERM®** a fibrotikus és szklerotikus bőrterületeket is mobilizálja az ödémás bőr alatti szövetekre gyakorolt nyíróhatása révén.

A **MOBIDERM®** fáslit kompressziós fásli alatt használják. Nyomáskülönbséget hoz létre a beépített habszivacs kocka támasztófelülete és a környezete között, ami a kezelt bőralatti kötőszöveti területek közötti nyíróhatást eredményezi. Ennek következtében a manuális nyirokdrenázs eredményét nemcsak fenntartják, hanem meg is erősítik. A felhasznált anyagok a lehető legnagyobb mobilitást biztosítják a fáslizás során, és ezáltal hozzájárulnak az optimális terápiás sikerhez, és magas elfogadottságot érnek el a páciensek körében.

Hatékony


- Az ödéma térfogatának gyors csökkentése
- A fibrotikus, szklerotikus vagy ödémás bőr fellazítása

Praktikus

- Könnyű, kényelmes és rugalmas, megtartja a mozgás szabadságát és ezáltal a nyirokelvezetés stimulálódik.

Kényelmes

- Puha betét
- Lágyság, a jobb, anatómiailag megfelelő illeszkedés érdekében

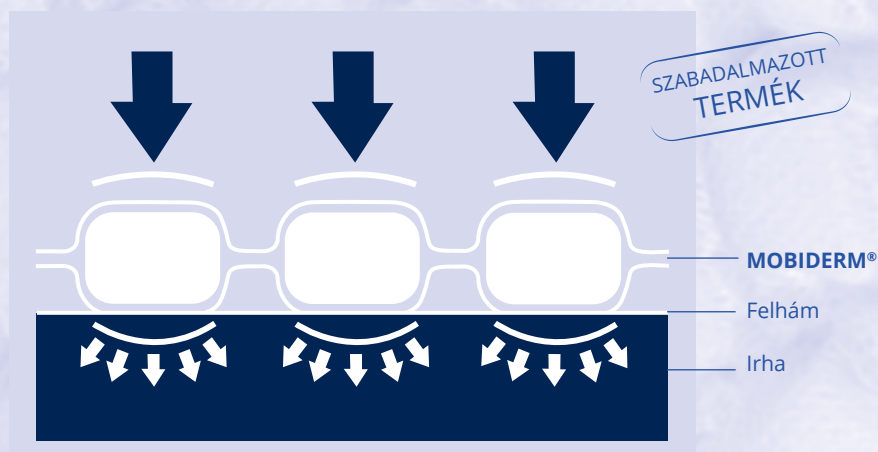

MOBIDERM mobilizáló lapok

Méret	Blokkok	Kód
25 cm x 1 m	5 mm x 5 mm	3710 01
20 cm x 1 m	15 mm x 15 mm	
25 cm x 25 cm	5 mm x 5 mm	



MOBIDERM mobilizáló fáslik

Méret	Blokkok	Kód
10 cm x 3 m	5 mm x 5 mm	3720 01
	15 mm x 15 mm	





NYIROKÖDÉMA

LYMPHATREX®

KÖF 2. KEZELÉSI SZAKASZ

NAPPALI KEZELÉS

A kiváló minőségű textil anyagok kompressziós hatásuk és rövid megnyúlásuk miatt különösen alkalmasak az ödéma kezelésére. A **LYMPHATREX®** kifejlesztése során a vénás és a hegkezelés területén alkalmazott elasztikus szövetek gyártásában szerzett széleskörű tapasztalatainkat hasznosítottuk.

Ezt a tudást most az ödémakezelő terápia szolgálatába helyezzük.

Színek és tulajdonságok



Világos
bézs



Karamell*



Fekete

LYMPHATREX® Fine

49% poliamid, 33% tergal®, 18% elasztán, 2-es kompr. osztály
Magas kopásállóság, könnyű viselet. 2-es stádiumú ödémáig.

LYMPHATREX® Poly

82% poliamid, 18% elasztán, 2-es kompr. osztály
Aktív betegek számára. Könnyen felhelyezhető, gyorsan szárad. 2-es stádiumú ödémáig.

LYMPHATREX® Poly Strong

73% poliamid, 27% elasztán, 2-es, 3-as kompr. osztály
Aktív betegek számára. Gyorsan szárad. 3-as stádiumú ödémáig.

* csak Poly és Poly Strong modellekben

LYMPHATREX®

A **LYMPHATREX®** több évtizedes tapasztalat eredménye, amit a THUASNE a kompressziós terápia területén szerzett. Folyamatosan dolgozunk a továbbfejlesztésen - az orvosi ismeretek, a betegek egyéni kívánságai és a legmagasabb viselési kényelem elérése határozzák meg erőfeszítéseink irányát. Így jött létre a **LYMPHATREX®**, egy tökéletes kompressziós hatással és megnyúlási képességgel bíró anyag, elsősorban az ödéma kezelésére.

Nagyon fontos számunkra, hogy a kompressziós ruha viselete a páciens számára a lehető legkényelmesebb legyen. Mindent megteszünk, mert csak a folyamatos viselése eredményez javulást: az ödémamentes állapotot, a nyiroködéma kiürült állapotának megtartását, a fenntartható stabilitás megtalálását.

Az egyedi gyártású kompressziós anyagok terén szerzett évtizedes tapasztalataink kiválóan illeszkedő kompressziós ruhákat biztosítanak.

Az anyagok megfelelnek az egészségügyi követelményeknek (rövid megnyúlásúak), de az Ön kívánságait és igényeit is kielégíti: vonzó színválasztékkal, kellemes viselettel, valamint magas szintű kényelemmel, amely a kiváló nyúlási tulajdonságokban rejlik. Az orvosi szempontból szükséges nyomás ellenére nagy mozgási szabadságot biztosítanak.

A mindennapi használatra alkalmas **LYMPHATREX®** anyagok bőrbarátok, esztétikusak, légáteresztők és nem okoznak allergiát.

LYMPHATREX® TULAJDONSÁGOK ÉS SZOLGÁLTATÁS

A **LYMPHATREX®** egyedi, mint minden páciens. Átfogó támogatást nyújtunk mind az alapanyagokkal és a méretvétellel kapcsolatos kérdésekben, mind a kompressziós öltözetek megrendelésével, alkalmazásával és viselésével kapcsolatos gyakorlati kérdésekben.

A **LYMPHATREX®** kompressziós öltözetek magas színvonalú anyagok célzott választékát nyújtják, amelyek mindegyike kiváló tulajdonságokkal rendelkezik a különböző egészségügyi követelményeknek és viselési igényeknek megfelelően.


A **LYMPHATREX® Fine** könnyen felvehető és a legjobb bőrkompatibilitás és kiváló viselési kényelem jellemzi. A puha **Tergal®** szál stabilizálja a bőr nedvességét és hőmérsékletét.

A **LYMPHATREX® Poly** aktívabb betegek számára készült.

A kellemesen viselhető poliamid mikroszál könnyen elpárologtatja az izzadságot, és nagyon gyorsan megszárad. Mindkét anyagot 2-es kompressziós osztályban gyártjuk.

Ha a kezelendő ödéma stádiuma erősebb kompressziót igényel, a **LYMPHATREX® Poly Strong** erős minősége a legjobb választás. Az elasztán nagyobb mennyiségével a kötött anyagban magasabb kompressziós osztályt lehet elérni, anélkül, hogy veszélyeztetnénk a kiváló viselési kényelmet.

Nyomás-megnyúlás görbe

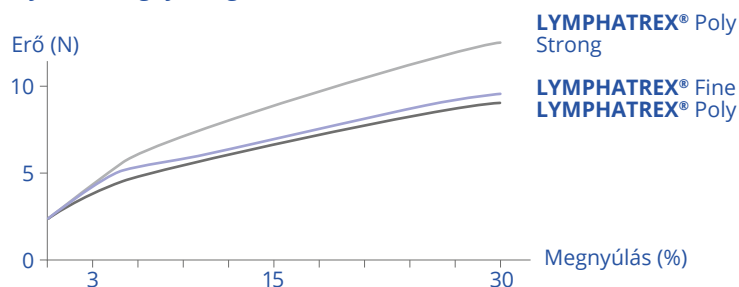


Speciális képzéseink során bemutatjuk a helyes méretvételi technikát és a megfelelő opciók kiválasztásának módját. Az egyéni gondozás és az ödémás betegek kezelésével kapcsolatos speciális ismereteket és kompetenciákat adunk át. Irodai és értékesítő munkatársaink is szívesen segítenek és adnak tanácsot.

Kényelem: Az anatómiai kötés optimális illeszkedést biztosít. Számos kiegészítő és rögzítési lehetőség biztosítja, hogy a kompressziós öltözet könnyen viselhető, biztonságosan tartó és szabad mozgást biztosító legyen: pl. az öltözethez adaptált rögzítők, mint a cipzárok és a kettős kapcsok.

Napi viselet: Ideális esetben a kompressziós ruhát az aktív nap során, a felkelés és az alvás között kell viselni. Ettől csak az orvos utasítása alapján szabad eltérni. Mosakodás, fürdés vagy bőrápolás idejére a kompressziós ruhadarab eltávolítható. Ugyanez vonatkozik az uszodalátogatásra is. Ha bármi szokatlant észlel, legyen az bőrpír, fájdalom vagy a bőr túlmelegedése, azonnal forduljon orvosához!



LYMPHATREX® KABÁT ÉS MELLÉNY – TERMÉKELŐNYÖK ELSŐ PILLANTÁSRA

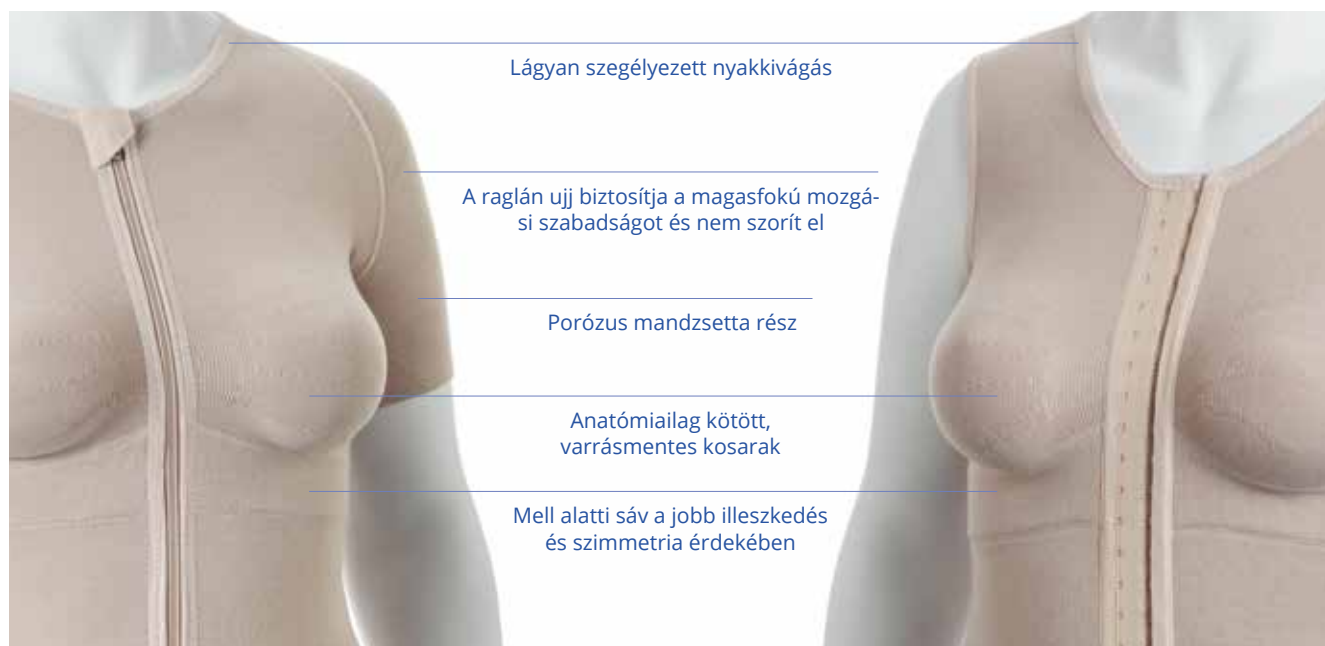

Kabát (méretes)

Elöl bevarrt cipzárral, rövid ujjú, tépőzár-darabok, különböző karhosszúsággal rendelhető, elöl vagy hátul záródó kivitelben, kosarak lezárása alsó csíkokkal a jobb illeszkedés érdekében.

Rendelhető: **LYMPHATREX® Fine** 2-es kompr. oszt.
LYMPHATREX® Poly 2-es kompr. oszt.

Opcionális:

kosárba beépített protézistartó zseb(ek),
hosszú ujj(ak),
kombinált heg- és ödéma terápia bevarrt
Silon-Tex® betéttel a kosárban,
zárás kapcsokkal vagy cipzárral,
rögzítés alul tépőzárral vagy tépőzár darabokkal,
derékpánt vagy ágyéki pánt

Mellény (méretes)

Elülső kapcsokkal, ágyéki pánttal, elöl vagy hátul záródó kivitelben, kosarak lezárása alsó csíkokkal a jobb illeszkedés érdekében.

Rendelhető: **LYMPHATREX® Fine** 2-es kompr. oszt.
LYMPHATREX® Poly 2-es kompr. oszt.

Opcionális:

kosárba beépített protézistartó zseb(ek),
kombinált heg- és ödéma terápia bevarrt
Silon-Tex® betéttel a kosárban,
zárás kapcsokkal vagy cipzárral,
rögzítés alul tépőzárral vagy tépőzár darabokkal,
derékpánt vagy ágyéki pánt



Kesztyű (méretes)

ujjakkal (zárt vagy nyitott ujjvégekkel)
vagy ujjak nélkül
nyitott/ zárt
Egyedi karhossz (AC1 - AG).
Karharisnyával kombinálható.

Rendelhető:
LYMPHATREX® Fine 2-es kompr. oszt.
LYMPHATREX® Poly 2-es kompr. oszt.



Karharisnya (méretes)

Különböző hosszúságú karharisnya anatómiai könyökkialakítással, kesztyűvel kombinálható.

Rögzítési lehetőségek:
Tépőzárral vagy tépőzár darabokkal, mell-tartó pánt/ vállpánt

Rendelhető:
LYMPHATREX® Fine 2-es kompr. oszt.
LYMPHATREX® Poly 2-es kompr. oszt.

Az oldal összes terméke rendelhető:
LYMPHATREX® Poly 2-es kompr. oszt., **LYMPHATREX® Poly Strong** 2-es, 3-as kompr. oszt.



Lábtyű (méretes)

az A-A1 lábujjak nyitottak
 nyitott / zárt lábujjak
 Harisnyával kombinálható



Felvételt segítő eszköz

(a többi felvételt segítő eszközt lásd az 50. oldalon)



Félharisnya (méretes)

nadrág zárt ágyékkal,
 jobb láb F-G, bal B-G,
 nyitott / zárt ágyék,
 különböző lábhosszúságokban (AT, CT, FT)
 lábfejjel is, a lábvég nyitott/zárt



Harisnya (méretes)

AG combfix zárt lábfejjel,
 ferde végződés, göbös csúszásgátló
 nyitott / zárt lábvég A-F, A-G
 Rögzítési lehetőségek:
 tapadószalag, tapadószalag-darabok,
 csípő rögzítés.
 Kerékpáros nadrággal kombinálható.



Harisnya (méretes)

AD zokni nyitott lábvéggel, ferde
 végződés, keskeny göbös lecsúszásgátló,
 nyitott / zárt lábvéggel
 Rögzítési lehetőségek:
 tapadószalag, tapadószalag-darabok,
 Capri nadrággal kombinálva hordható.



Ferde végződés



Anatómiai kötésű térd



Y-sarok



MOBIDERM® AUTOFIT

KÖF 2. KEZELÉSI SZAKASZ


ÉJSZAKAI KEZELÉS

A **MOBIDERM® autofit** használatával a páciensek még éjszaka is fenn tudják tartani a KÖF eredményeit. Mert még a fenntartó fázisban is fontos a test megtámasztása. Rendszeresen használva a **MOBIDERM® autofit** megakadályozza a rettegett visszatelődés hatását: a tünetek súlyosbodását az ödéma csökkentés után.

A THUASNE nappali kompressziós termékek kínálata optimálisan egészül ki ezzel a termékkel.


Hatékony: a duzzadt végtag térfogatának jó stabilizálása - a fibrotikus, szklerotikus vagy ödémás bőr fellazítása. **Praktikus:** Könnyű, kényelmes és rugalmas, a viselője megtartja mozgásszabadságát, és ezáltal a nyirokelvezetést stimulálja. **Kényelmes:** puha betét - a jobb, anatómiailag helyes illeszkedés érdekében. A kompressziós ruházatot korábban viselő betegek 82%-a részesíti előnyben a **MOBIDERM® autofit**et a MARILYN tanulmány szerint.

A MOBIDERM® autofit - kényelmes megoldás a nyiroködéma kezelésére: könnyen felvehető, kényelmes viselet, bonyolult fáslizás nélkül.

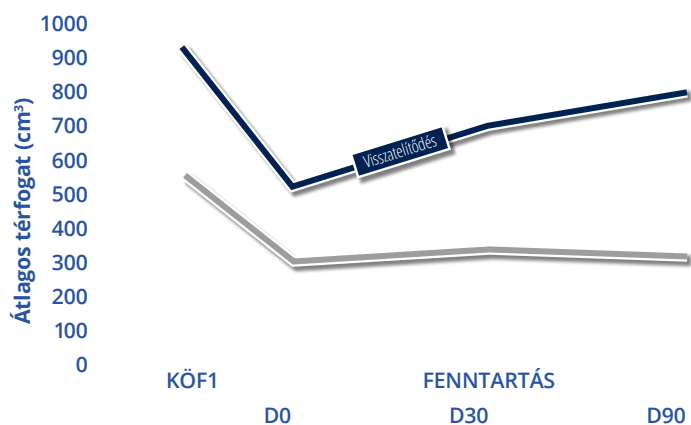

Térfogatváltozások a magas válaszreakciójú pácienseknél (cm³)

A **MOBIDERM® autofit** előnyei különösen a magas válaszreakciójú pácienseknél jelentkeznek (a térfogatcsökkenés több mint 35%-kal nagyobb a csökkentő fázisban, POLIT-tanulmány, JMV 2014).

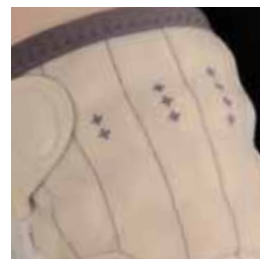

Több rögzítési zóna:
**az egyes betegek
egyedi morfológiájához
való alkalmazkodás**

Beállítási mutatók:
**az ödéma térfogat változásának
pontos és reprodukálható beállítása
és ellenőrzése lehetséges**



Félig nyitott eszköz:
könnyű fel- és levenni



Tépzáras rögzítések:
gyors alkalmazás, tartósság



Karharisnya beépített, nyitható füllel:
**csökkenti az ödéma elvándolásának
kockázatát; a kézfej kioldozható a
napi munkákhoz**

ALSÓ VÉGTAG: MOBIDERM® AUTOFIT ZOKNI VAGY COMBFIX

SZABADALMAZOTT
TERMÉK



Több rögzítési zóna:

**az egyes betegek
egyedi morfológiájához
való alkalmazkodás**

Beállítási mutatók:

**az ödéma térfogat változásának
pontos és reprodukálható beállítása
és ellenőrzése lehetséges**



Félig nyitott eszköz:
könnyű fel- és levenni



Csúszásmentes talp:
**csökkenti az elcsúszást
járás közben**



Tépzáras rögzítés: **gyors felhelyezés,
tartósság**

Dupla tépzár sor: **jobb beállíthatóság
és jobbos/balos használat is lehetsé-
ges**



MOBIDERM® AUTOFIT MÉRETTÁBLÁZAT

Méret	Kézfej körméret (cA)	Csukló körméret (cC)	Alkar körméret (cD) <i>(a kar legszélesebb részén)</i>	Hónalj körméret (cG)	Termékkód	
					Normál ℓ = 40 - 45 cm	Hosszú ℓ = 45 - 50 cm
JOBB KARHARISNYA						
1	17 - 21 cm	15 - 19 cm	22 - 28 cm	25 - 32 cm	37330220100261	37330220100271
2	17 - 21 cm	16 - 20 cm	24 - 30 cm	29 - 36 cm	37330220200261	37330220200271
3	18 - 22 cm	17 - 21 cm	26 - 32 cm	33 - 40 cm	37330220300261	37330220300271
4	18 - 22 cm	17 - 21 cm	28 - 34 cm	37 - 44 cm	37330220400261	37330220400271
5	19 - 23 cm	18 - 22 cm	30 - 36 cm	41 - 48 cm	37330220500261	37330220500271
6	20 - 24 cm	19 - 23 cm	31 - 37 cm	45 - 52 cm	37330220600261	37330220600271
BAL KARHARISNYA						
1	17 - 21 cm	15 - 19 cm	22 - 28 cm	25 - 32 cm	37330220100262	37330220100272
2	17 - 21 cm	16 - 20 cm	24 - 30 cm	29 - 36 cm	37330220200262	37330220200272
3	18 - 22 cm	17 - 21 cm	26 - 32 cm	33 - 40 cm	37330220300262	37330220300272
4	18 - 22 cm	17 - 21 cm	28 - 34 cm	37 - 44 cm	37330220400262	37330220400272
5	19 - 23 cm	18 - 22 cm	30 - 36 cm	41 - 48 cm	37330220500262	37330220500272
6	20 - 24 cm	19 - 23 cm	31 - 37 cm	45 - 52 cm	37330220600262	37330220600272

Méret	Boka körméret (cB) <i>(a boka legkes- kenyebb részén)</i>	Vádli körméret (cC) <i>(a vádli legszélese- bb részén)</i>	Térd alatti körméret (cD) <i>(a szárpapocscson- ton keresztül)</i>	Termékkód (jobb/bal)			
				Rövid ℓD = 38 - 40 cm	Normál ℓD = 40 - 42 cm	Hosszú ℓD = 42 - 44 cm	Extra hosszú ℓD = 44 - 46 cm
ZOKNI							
1	16 - 24 cm	24 - 35 cm	25 - 36 cm	37340120100231	37340120100232	37340120100233	37340120100234
2	20 - 28 cm	32 - 43 cm	32 - 43 cm	37340120200231	37340120200232	37340120200233	37340120200234
3	24 - 32 cm	40 - 51 cm	39 - 50 cm	37340120300231	37340120300232	37340120300233	37340120300234
4	28 - 36 cm	48 - 59 cm	46 - 57 cm	37340120400231	37340120400232	37340120400233	37340120400234

Méret	Boka körméret (cB) <i>(a boka legkes- kenyebb részén)</i>	Vádli körméret (cC) <i>(a vádli legszélese- bb részén)</i>	Comb körméret (cG) <i>(a comb legszélesebb részén)</i>	Termékkód (jobb/bal)			
				Rövid αG = 67 - 72 cm	Normál αG = 72 - 77 cm	Hosszú αG = 77 - 82 cm	Extra hosszú αG = 82 - 87 cm
COMBFIX							
1	16 - 24 cm	24 - 35 cm	46 - 57 cm	37350120100231	37350120100232	37350120100233	37350120100234
2	20 - 28 cm	32 - 43 cm	53 - 65 cm	37350120200231	37350120200232	37350120200233	37350120200234
3	24 - 32 cm	40 - 51 cm	61 - 72 cm	37350120300231	37350120300232	37350120300233	37350120300234
4	28 - 36 cm	48 - 59 cm	68 - 80 cm	37350120400231	37350120400232	37350120400233	37350120400234

ℓD: padlótól a térdig tartó magasság
ℓG: padlótól a combtőig tartó magasság

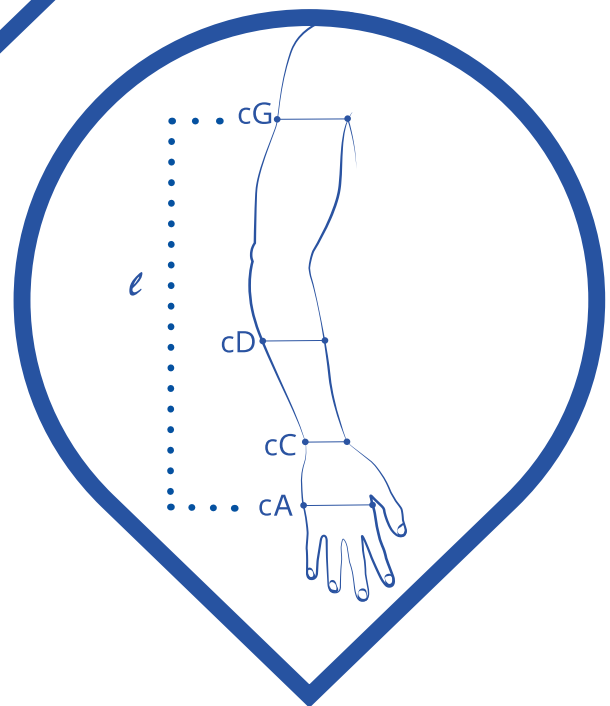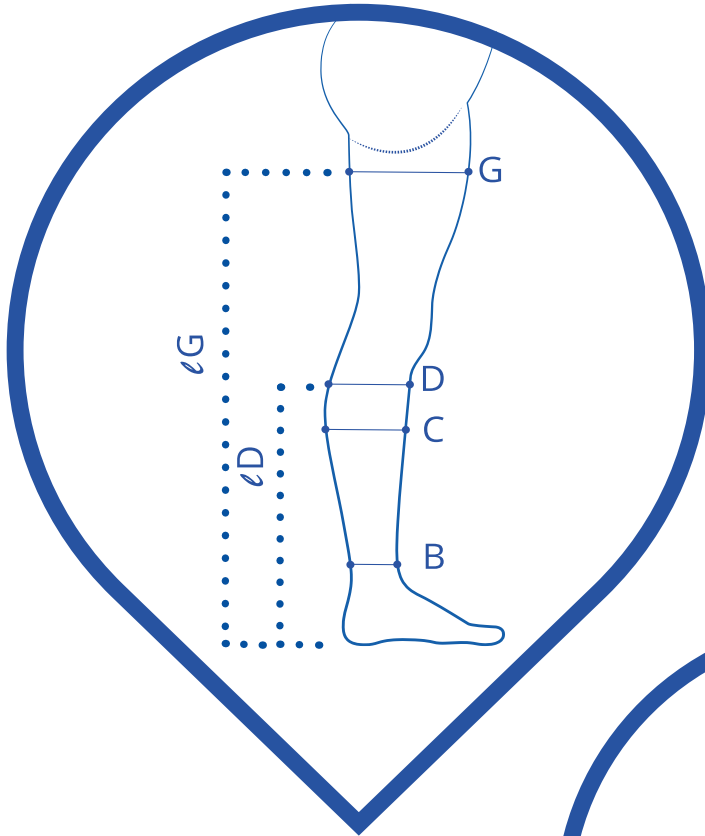



HEGKEZELÉS

CICATREX®

A **CICATREX®** kompressziós ruházat az első számú választás a heg-
gek gyógyítására bőrátültetés, termikus, kémiai vagy elektromos
sérülések vagy más mély bőrkárosodások után.

A THUASNE a legmagasabb minőségű anyagokat használja, sze-
mélyre szabott, egyedi termékeket és kiváló szolgáltatást kínál.
Kompetens, egyedi, különböző.

Kompetencia és jó minőségű anyagok a hatékony kezeléshez.
Sokan szenvednek életük során súlyosabb sérülést a bőrükön.
Hegek alakulnak ki, melyek méretük, állapotuk és az érintett test-
rész miatt funkcionális és esztétikai korlátokat hozhatnak létre. A
THUASNE az 1990-es évek óta sok tapasztalatot gyűjtött a hegte-
rápiában: minden korosztály számára, a teljes gyógyulási folya-
mathoz.

A THUASNE a beteg oldalán áll a kezdeti ellátástól a sérülések
begyógyulásáig, mivel a **CICATREX®** a kompresszió által elősegí-
ti a hegcsövetben a kollagén képződést, ezáltal megakadályoz-
za a burjánzást, a keloidokat és a behúzódó hegesevést. Ez na-
gyon fontos a bőr megjelenése és az érintett testrész mobilitása
szempontjából. A betegek aktívan élhetik mindennapi életüket. A
CICATREX® hegkezelő kompressziós ruházatot olyan alapanya-
gok jellemzik, amelyek nagyon specifikusak, mindegyikük opti-
mális tulajdonságokkal segíti elő a gyógyulási folyamatot - a be-
teg helyzetének megfelelően.

CICATREX®

GYÓGYÍTÁS KITERJEDT TESTRESZABÁS RÉVÉN

A **CICATREX®** név a francia „Cicatrice” szóból származik, melynek
jelentése: „heg”. Mivel kompressziós öltözeteink pozitív hatással
vannak a hegképződésre, természetes volt a **CICATREX®** már-
kanév kiválasztása. A **CICATREX®** anyagok hosszú megnyúlású
volta miatt a gyógyulás nemcsak orvosi szempontból rendkívül
hatékony, hanem könnyen fel- és levehető is. Nem korlátozza a
mobilitást pl. a gyógytorna során sem. Ez a **CICATREX®**-t sokkal
elfogadhatóbbá teszi a páciensek számára.

Számos **CICATREX®** opció áll rendelkezésre a kényelem növe-
lése érdekében. A kontraktúra követő és a kompressziómentes
anyag megakadályozza a gyűrődéseket. A rögzítések egyéni-
leg és diszkréten varrottak. Ezekkel teljesen egyedi ruhadarab
hozható létre minden páciens számára, a lehető legnagyobb
kényelem mellett.


A gyógyulási folyamatot a páciens **CICATREX®** ruházat elfogadásával támogatja. Az optimális gyógyulás sikerének fontos előfeltétele a magasszintű elfogadás.

Az opciók segítik a kompressziós ruházat hatékonyságát a bonyolultabb testrészeken. Például pelották segítenek a nyomás növelésében vagy a nyomásátvitelben és a memóriahabos betét a kompressziós nyomás egyenletes eloszlásában. A THUASNE még a nehezen kompresszálnható testrészekre, mint például a lábujjak közötti bevágások vagy az ujjak közére is egyedi megoldásokat kínál az optimális nyomás eléréséhez lábujj- vagy ujjszérválasztókkal és kompressziós varratokkal.

Színek



Zöld

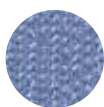

Farmer



Bézs



Fehér



Fekete



Rózsaszín



Piros



CICATREX® EGYEDI ÖLTÖZETEK

Tulajdonságok és opciók:




A **CICATREX® Nature kötött** és a **CICATREX® Nature szőtt**, a jolly-joker: szinte minden igényhez. A viszkóz nagy aránya jellemzi. A viszkóz természetes nyersanyagokból származik. A természetesség folytatódik a ruhában: bőrbárát és szellőző. A nagy rugalmasság megkönnyíti a ruhák fel- és levételét. A szövött anyag ideális az első ellátáshoz. A kötött változat lapos varratokat és anatómiai formájú kötést kínál, ami tovább növeli a kényelmet.


A **CICATREX® Rigid**-et sima felület és nagy tartósság jellemzi. Ezt a szövetben lévő poliamid mikroszál biztosítja. A sima felületszerkezet megakadályozza a csúnya bolyhosodást, a magas poliamid tartalom miatt a ruhadarab nagyon gyorsan szárad. A **CICATREX® Rigid** kiemelkedő tartóssága miatt különösen alkalmas a fizikailag aktív felnőttek és gyermekek öltözetének. Hét különböző színben áll rendelkezésre minden korosztály számára, a személyes preferenciák szerint.

A **CICATREX® Skin** a legszebb és legvékonyabb anyag. Az 59% poliamid és 41% dorlasztan a **CICATREX® Skin**-ből készült ruházatok selymes, puha összetevői. Ugyanakkor elegáns a megjelenése, enyhe fényességgel. Gyorsan szárad, ami egy további előny. Öt vonzó színben.

A **CICATREX® Silver** egy másik viszkózos kötött anyag ezüstbevonatú poliamid szállal. Az ezüst elpusztítja a baktériumokat a bőrön és véd a fertőzések ellen. Ez különösen fontos az érzékeny bőrrel vagy fertőzésekkel küzdő betegek esetében. Enyhíti a viszketést és termodinamikai hatása van. A **CICATREX® Silver**-ben négy anyagösszetevőt dolgoztunk össze: 46% viszkóz, 27% poliészter, 19% spandex és 8% ezüst bevonatú poliamid.

Nyomás-megnyúlás görbe

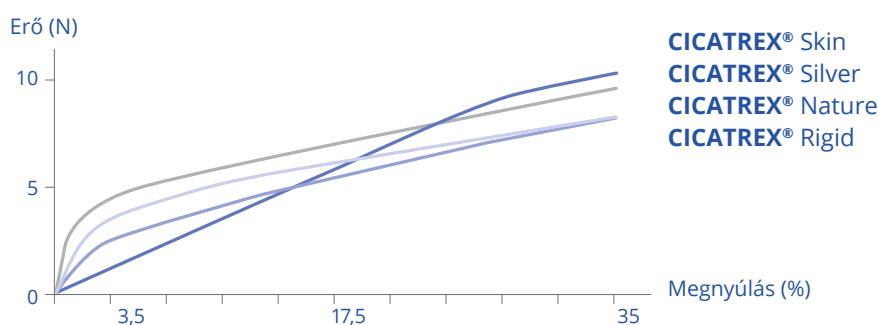

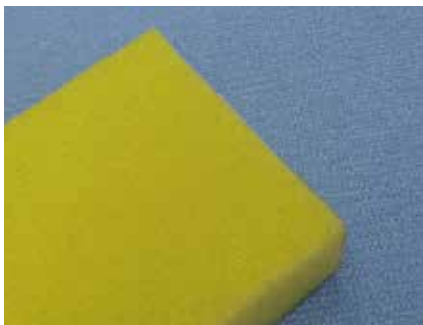

Memória habszivacs

Ez az opció a kitüremkedések kiegyenlítésére és a nyomás elosztására szolgál. A memória habot bevarrjuk a ruházatba. Szintetikus bőrrel kombinálva is varrható, amely véd a külső behatások ellen.



Pelotta

Pelottákat a nyomás növeléséhez és a nyomásátvitelhez használunk. Bevarrhatók vagy lazán rögzíthetők, és kombinálhatók Silon-TEX®-szel.



Silon-TEX®

Egy speciális szilikon alapú anyag, melyet részben bevarrnak a ruházatba. A Silon-TEX® nedves környezetet biztosít a bőrnek, és ezáltal rugalmasan és puhán tartja a heget. A felület legfeljebb kétharmadát fedheti le.



Ujj- és lábujjszétválasztó

Az ujj vagy lábujjköztök területén növeli a nyomást. Kesztyűhöz vagy lábtűhöz illeszthető, és a megfelelő kompressziós eszközzel együtt kell viselni.



Műbőr rátét

A tapadás növelése érdekében a tapadó felületen szintetikus bőr borítás alkalmazható. Kidörzsölődő testrészeknél is védelmet nyújt a kopás ellen.




Kontraktúra követő varrás

Könyök- és térdhajlaton a CICATREX® kompressziós ruházaton kontraktúra követő varrást lehet beépíteni. Segíti elkerülni az anyag túlzott felgyűrődését, ami korlátozná a mozgást.



Rögzítések

A betegek egyéni igényei szerint és gyakorlati megfontolások szerint helyezhetők el. Rögzítésnek cipzár (rá- vagy bevarrva), tépőzár vagy kapcsok kérhetők.

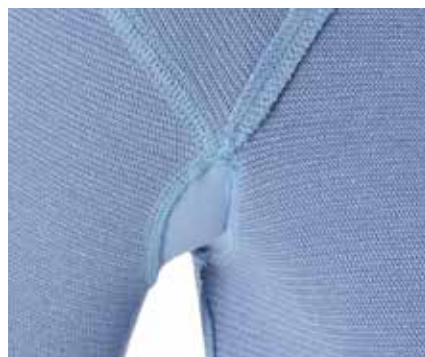

Kompressziómentes anyag

A hónaljnál vagy a mellkason, de az ujjak vagy a lábujjak között kompressziómentes anyag is használható, ha ezeknél a testrészeknél nincs szükség nyomásra. Elkerülhetők a gyűrődések és fokozza a viselési kényelmet.

A következő termékek állnak rendelkezésre CICATREX® Nature szőtt és CICATREX® Skin anyagokból:



Fej-/nyakpánt

a kompresszió tépőzár segítségével változtatható

Képváltozat: fejpánt.
CICATREX® Nature szőtt



Állpánt

ferde fejpánttal, fülek szabadon / fedetten

Rögzítés tépőzárral.

Nyitott maszk
hátsó tépőzár, a fülek szabadon / fedetten

Képváltozat: maszk, fedett fülekkel.
CICATREX® Nature szövött



Zárt maszk

szabad / fedett látómezővel, fülek kompresszióval vagy anélkül

Képváltozat: Maszk orrborítással és nyitott fülekkel.
CICATREX® Nature szőtt

A következő termékek állnak rendelkezésre CICATREX® Nature kötött, CICATREX® Nature szőtt, CICATREX® Rigid, CICATREX® Skin és CICATREX® Silver anyagokból:



CICATREX® Nature szőtt

Ujjbaba

pánttal vagy anélkül, nyitott/zárt ujjvég

Képváltozat: zárt ujjvég, csuklópánttal.

CICATREX® Nature kötött



Kesztyű ujjal / ujj nélkül

nyitott/zárt ujjvég, választható karhosszal, karharisnyával kombinálható

Az ujjak közti redőknél kompressziós varratokkal növelhető a nyomás.

Képváltozat: A-D rávarrt cipzárral, oldalirányú és keskeny passzéval

CICATREX® Nature kötött



Ujjszétválasztó

a kesztyűhöz adaptált eszköz az ujjközők nyomásának növelésére

Képváltozat: **CICATREX® Nature kötött** kesztyű ujjakkal, **CICATREX® Skin** ujjszétválasztó.

A következő termékek állnak rendelkezésre CICATREX® Nature kötött, CICATREX® Nature szövött, CICATREX® Rigid, CICATREX® Skin és CICATREX® Silver anyagokból:



Karpánt

különböző hosszúságban
kesztyűvel kombinálható

Rögzítési lehetőségek: tépőzár, tépőzár
darabok, vállpánt, melltartó pánt.

Képváltozat: F-G válltok és melltartó pánt.

Kötött CICATREX® Nature



Speciális kar

amely a kart és a vállat foglalja magába
tépőzárral vagy cipzárral, **szövtt Nature**
vagy **Skin** anyagból

Képváltozat: elülső tépőzár, hónalj kom-
presszióval, kontraktúra követő varrattal a
könyöknél.



Mellény

az alsó mellkasi szakasz kompressziójához
elől vagy hátul záródó kivitelben

Melltartó kosár Nature szövtt vagy Skin
anyagból

kompresszió nélkül is választható, proté-
zistartó betét beépíthető.

Opcionális ágyéki pánt a biztonságos
illeszkedésért.

Képváltozat: elülső cipzárral
és tépőzáras fülekkel.

CICATREX® Nature szövött



Kabát

különböző ujjhosszúságban,
elől vagy hátul záródó kivitelben

A hónalj-rész és a kosár **Nature szövtt** vagy **Skin**
anyagból, kompresszió nélkül is választható. A
kosárba protézistartó betét építhető.

Ágyéki pánt választható a biztonságos
illeszkedésért.

Képváltozat: elülső cipzárral, kosarakkal, ágyéki
pánttal.

A következő termékek állnak rendelkezésre CICATREX® Nature kötött, CICATREX® Nature szőtt, CICATREX® Rigid, CICATREX® Skin és CICATREX® Silver anyagokból:



Deréköv

különböző hosszúságban, lehetséges átlós merevítővel (hasfal megerősítés)
rögzítési lehetőségek: tépőzár, tépőzár darabok, derékpánt, harisnyatartó

Képváltozat: elülső tépőzárral és tépőzár darabokkal.

CICATREX® Nature szőtt



Szőtt nadrág

nyitott / zárt ágyéki rész, különböző szárhosszúságokban, lábfejjel is, nyitott/zárt lábcsúccsal, választható hosszabbítással, lehetséges átlós merevítővel (hasfal megerősítés, különböző rögzítési lehetőségekkel)

Képváltozat: rövid szárral, ágyéki betoldással és keresztirányú nyílással.

CICATREX® Nature szőtt



Kötött nadrág

varrásmentes anatómiai kialakítás, nyitott / zárt ágyéki rész, különböző szárhosszúságokban, lábfejjel is, választható testrész hosszabbítással, lehetséges átlós merevítővel (hasfal megerősítés), különböző rögzítési lehetőségekkel

Képváltozat: nyitott ágyék, elülső kapcsolók, hosszú jobb láb lábfejjel, zárt lábfej, derékpánt.

CICATREX® Nature kötött



Lábszár

kompressziós darab a combra és a vádlira, anatómiai kialakítással

Rögzítési lehetőségek: tépőzár, tépőzár-darabok, csípő rögzítés.

Képváltozat: B-G csípő rögzítéssel és lábfej pánttal.

CICATREX® Nature kötött



Szár lábfej résszel


különböző hosszúságban, nyitott/zárt csúccsal, AA1 és AD között nyitott/zárt lábcsúccsal

Opcionális kompressziós varratok vagy lábujj-szétválasztó, a lábujjak közti rés nyomásának növelésére, különböző rögzítési lehetőségekkel.


Képváltozat: AG nyitott lábcsúccsal, széles, göbös lecsúszásgátlóval.

CICATREX® Nature kötött


Sematikus ábrák

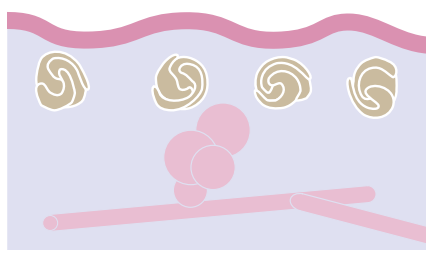

Hipertrófiás heg
kezelés előtt

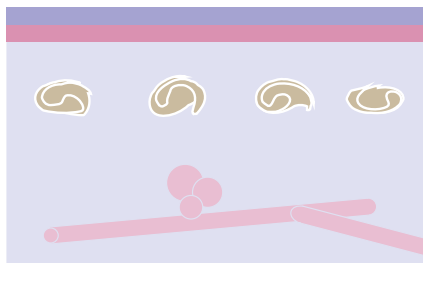

Kompressziós hatás
kezelés alatt

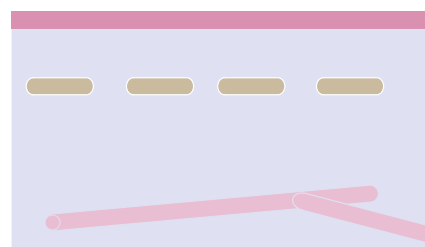

Lapos, gyógyult heg
kezelés után

A hegére gyakorolt enyhe, kb. 30 Hgmm-es egyenletes nyomással a **CICATREX®** jelzi a szövetnek, hogy elérte a bőr szintjét. A heg keringése normalizálódik, a kollagén szálak párhuzamosan rendeződnek.


A **CICATREX®** megakadályozza a szöveti gyulladást, csillapítja a viszketést és biztosítja a friss hegek teljes védelmét.

CICATREX® kiegészítők gyermekeknek

Színes öröm a gyermekellátás számára, kiváló minőségű **CICATREX®** kompressziós ruházatunk még színesebbé válik, és az egyedi méretes öltözetekhez használt valamennyi anyagtípus már rávasalható transzferrel is kapható (motívum méret kb. 5 x 4 cm). A „Cica Trex - varázsló” négy kis barátját ábrázolják a képeskönyvünkből.



Gloria von Glanz

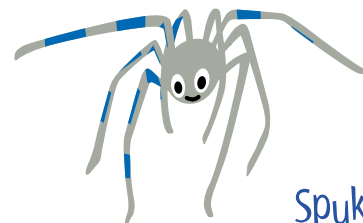

Spuk



Hubertus Hui



Minden egyedi gyártású termék kérhető
színes varratokkal is!




Elja Ehrenwert

CICATREX® STANDARD ÖLTÖZETEK

Gyorsabb kiszállítás!

MÉRETTÁBLÁZAT ALSÓ VÉGTAGRA
csípőszorító, csípőszorító merevítővel, rövid
nadrág, halásznadrág, hosszú nadrág

A csípő kerületét (A) 3 vagy 4 cm-rel a
szeméremcsont felett, valamint a fenék
felső részén mérje.

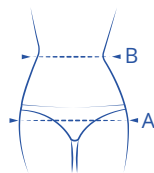

Méret	Csípő körméret (A)	Derék körméret (B)
1	88 - 94 cm	62 - 72 cm
2	95 - 101 cm	67 - 79 cm
3	102 - 108 cm	73 - 85 cm
4	109 - 115 cm	80 - 93 cm
5	116 - 122 cm	90 - 104 cm
6	123 - 129 cm	97 - 113 cm

Csípőszorító

3415 01

Méret	Szín	Anyag
1		Cicatrex Nature
2		
3		
4		
5		
6		

Csípőszorító merevítővel

3417 01

Méret	Szín	Anyag
1		Cicatrex Nature
2		
3		
4		
5		
6		

Rövid nadrág

3403 01

	Méret	Szín	Anyag
	1		Cicatrex Nature
	2		
	3		
	4	Fehér	
	5		
	6		

Halásznadrág

3412 01

	Méret	Szín	Anyag
	1		Cicatrex Nature
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		

Hosszú nadrág

3420 01

	Méret	Szín	Anyag
	1		Cicatrex Nature
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		

Maszk

3402 01

Méret	Fej körméret (A)	Szín	Anyag
0	51 - 52 cm		Cicatrex Nature
1	53 - 55 cm		
2	56 - 57 cm		
3	58 - 59 cm		

Részleges maszk

3410 01

Méret	Nyak körméret (B)	Szín	Anyag
1	27 - 30 cm		Cicatrex Nature
2	31 - 36 cm		
3	37 - 45 cm		

Nyitott

3416 01

Méret	Fej körméret (A)	Szín	Anyag
0	51 - 52 cm		Cicatrex Nature
1	53 - 55 cm		
2	56 - 57 cm		
3	58 - 59 cm		


Fülpánt

3411 09


Méret	Fej körméret (A)	Szín	Anyag
1	< 52 cm		Cicatrex Nature
2	> 52 cm		

Öv

3401 01

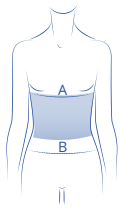

Méret	A mellkas alatt vagy a csípőnél vett méret (A / B)	Szín	Anyag
1	70 - 92 cm		Cicatrex Nature
2	93 - 114 cm		

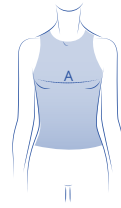


Ujjatlan mellény

3424 01

Méret	Mellkas körméret (A)	Szín	Anyag
1	74 - 82 cm		Cicatrex Nature
2	83 - 91 cm		
3	92 - 98 cm		
4	99 - 115 cm		
5	116 - 120 cm		
6	121 - 135 cm		

Hosszú szár


3425 01

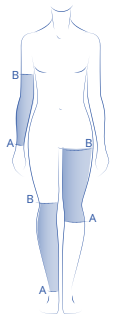

Méret	Disztális körméret (A)	Proximális körméret (B)	Magasság (AB)	Szín	Anyag
1	9 - 11 cm	19 - 23 cm	35 cm	 Fehér	Cicatrex Nature
2	11 - 14 cm	23 - 28 cm			
3	14 - 16 cm	28 - 32 cm			
4	16 - 20 cm	32 - 37 cm	45 cm		
5	20 - 25 cm	37 - 42 cm			
6	25 - 30 cm	42 - 48 cm			
7	30 - 40 cm	48 - 58 cm			
8	40 - 50 cm	58 - 67 cm			

Szár


3400 01

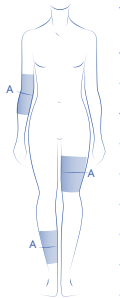

Méret	A szár közepén vett méret (A)	Magasság	Szín	Anyag
1	12 - 14 cm	20 cm	 Fehér	Cicatrex Nature
2	15 - 17 cm			
3	18 - 22 cm			
4	23 - 29 cm			
5	30 - 37 cm			
6	38 - 45 cm			
7	46 - 54 cm			
8	55 - 63 cm			

Nyirokódéma karharisnya

3449 01

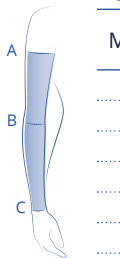

Méret	Disztális körméret (A)	Mediális körméret (B)	Proximális körméret (C)	Magasság (AC)	Szín	Anyag
1	13 - 15 cm	20 - 25 cm	22 - 28 cm	39 cm		Cicatrex Skin
2	15 - 17 cm	23 - 28 cm	25 - 31 cm			
3	17 - 19 cm	26 - 31 cm	29 - 35 cm			
4	19 - 21 cm	29 - 34 cm	33 - 39 cm			
5	21 - 23 cm	32 - 37 cm	37 - 43 cm			
6	23 - 26 cm	35 - 41 cm	41 - 48 cm			


Lábtű

3406 02



Méret	Körméret (A)	Szín	Anyag
1	21 - 22 cm	 	Cicatrex Skin
2	23 - 24 cm		
3	25 - 26 cm		
4	27 - 28 cm		

MÉRETTÁBLÁZAT SKIN KESZTYŰKHOZ

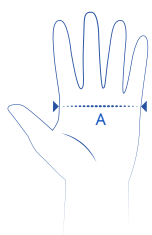

Méret	Kéz körméret (A)
1	13 - 14,5 cm
2	15 - 16,5 cm
3	17 - 18,5 cm
4	19 - 20,5 cm
5	21 - 22,5 cm
6	23 - 24,5 cm
7	25 - 26,5 cm
8	27 - 28,5 cm

Skin kesztyű

3448 01

Zárt ujjú, hosszú karharisnyával (könyökig)

Méret	Szín	Anyag
1		Cicatrex Skin
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Skin kesztyű

3448 02

Zárt ujjú, rövid karharisnyával (csuklóig)

Méret	Szín	Anyag
1		Cicatrex Skin
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		


Skin kesztyű

3448 03

Nyitott ujjú, rövid karharisnyával (csuklóig)

Méret	Szín	Anyag
1		Cicatrex Skin
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

MÉRETTÁBLÁZAT FILIFINE KESZTYŰKHOZ

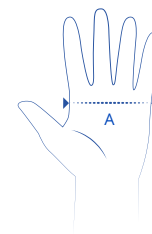

Méret	Kéz körméret (A)
1	13 - 14,5 cm
2	15 - 16,5 cm
3	16,5 - 18 cm
4	18,5 - 20 cm
5	20,5 - 22 cm
6	22,5 - 24 cm

Filifine kesztyű

3447 01

Méret	Szín	Anyag
1		Cicatrex Filifine
2		
3		
4		
5		
6		
	Bézs	

Ujjszétválasztó

3413 09

Méret	Hosszúság (A) ⁽¹⁾	Szín	Anyag
1	< 9 cm		51% Poliészter 45% Poliamid 4% Elastán
2	> 9 cm		

(1) Csukló hajlat és a középső ujj töve közti távolság

Ujjbaba

3446 01

Méret	Ujj körméret (A) ⁽²⁾	Hosszúság	Szín	Anyag
1	25 - 27 mm	100 - 110 mm		Cicatrex Skin
2	29 - 31 mm			

(2) Az ujjtőnél mért körméret

EGYES MODELLEK EGYEDI TERMÉKKATEGÓRIÁBAN IS KAPHATÓK!

FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ

- Feszítse szét az elastikus anyagot, amennyire csak lehetséges, hogy az érzékeny bőr ne irritálódjon az öltözék felhúzása közben.
- Segítse az anyagot, hogy egyenletesen illeszkedjen az adott testrész minden körvonalához, és megfelelő helyzetben legyen, anélkül, hogy túl feszesé válna.
- Húzza feljebb a karharisnyát, ha az túl hosszú lenne.
- Ügyeljen arra, hogy a könyök és a váll szabadon mozoghasson.



ÁPOLÁSI ÚTMUTATÓ

- A Cicatrex termékeket mindig kézzel mossa, a lehető leggyakrabban - szükség esetén napi rendszerességgel - szappannal vagy finom szövetű ruhaneműkhöz ajánlott mosószerrel. Ne adjon hozzá fehérítőt vagy folttisztítót. Alaposan öblítse és nyomkodja ki a felesleges vizet.
- Kiterítve szárítsa, ne tegye ki közvetlen hőszugárzásnak, mint amilyenek pl. a fűtés, vagy a közvetlen napsugárzás. Nem vasalható.



Ha lehetséges, javasoljon **két azonos formájú Cicatrex ruhadarabot**, hogy a páciens akkor is viselhessen egyet, miközben a másik mosás alatt van.

SZOLGÁLTATÁS

ARION FELHÚZÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖK KOMPRESSZIÓS RUHÁZATHOZ

A kompressziós ruházat megfelelő felvétele különösen stresszes lehet a magasabb kompressziós osztályokban, mert nagyon sok erőre van szükség. De mi a teendő, ha az erő és a hajlékonyság korlátozott? Az ARION kifejezetten funkcionális és megtérülő felhúzássegítő eszközöket fejlesztett ki erre a célra, melyek könnyebbé és gyorsabbá teszik a kompressziós termékek alkalmazását. Az ARION felhúzássegítő eszközök közvetlenül a THUASNE-től is beszerezhetők.

Termékelőnyök:

- A gondozók és a betegek fizikai terhelésének csökkentése
- Fokozott önállóság és beteg együttműködés
- Egyszerű alkalmazás
- Idő- és költségmegtakarítás
- A kidörzsölődés csökkentése a rendkívül sima, speciális bevonattal rendelkező anyagnak köszönhetően
- Az elasztikus harisnyák hosszabb ideig tudják megtartani terápiás kompressziójukat
- Kézi mosás enyhe mosószerrel 30 °C-on



Arion Easy-Slide felhúzássegítő eszköz nyitott kompressziós gyógyharisnyákhoz és harisnyanadrágokhoz



Arion Magnide felhúzássegítő eszköz zárt kompressziós gyógyharisnyákhoz



Arion Easy-Slide Arm felhúzássegítő eszköz kompressziós karharisnyákhoz



TSS kesztyű optimális fogást biztosít a kompressziós termékek felhúzásához, megakadályozza a köröm vagy ékszerek által okozott sérüléseket



Arion Magnide Kids felhúzássegítő eszköz zárt kompressziós gyógyharisnyákhoz gyermekek részére



Arion Easy-Slide Kids gyermek kompressziós ruhák felvételének megkönnyítésére

MOSÁS ÉS ÁPOLÁS

A LYMPHATREX®, a CICATREX® és a VENOFLEX kezelési útmutatója: A kompressziós eszközöket naponta kell mosni. Nemcsak kenőcs maradványok és zsír gyűlhet össze az anyagban, hanem a szőrzet, a verejték, a por és minden más olyan anyag is, amellyel az öltözetek érintkeznek. A rendszeres mosás megvédi Önt a fertőzésektől és a ruházatát az elhasználódástól. A mosás és a száradás idejére a kompressziós terápia megszakításának elkerülésére egy váltás öltözetre van szükség.

- Csak enyhe mosószerrel mossa az öltözetet.
- Használjon kímélő, 40 °C-os programot. Semmilyen körülmények között sem szabad öblítőszert használni!
- Tilos az eszközt radiátoron vagy más közvetlen hőforráson szárítani! Ez örökre tönkreteszi a kompressziós szálakat.
- Ha a Silon-TEX®-et hegkezelő kompressziós öltözetbe építették be, akkor a mosás után higiéniai okokból alaposan szárítsa meg a ruhadarabot, tartsa szabadon és szellőző állapotban.

A MOBIDERM® Autofit kezelési útmutatója

Mosás előtt zárja be a tépőzárakat. Két lehetőség van a mosásra:

- Kézi mosás: a terméket hideg szappanos vízben áztassa, tiszta szivaccsal dörzsölje át és nyomja ki a vizet.
- Gépi mosás: gyapjú ciklusban hideg vízben, mosóhálóban mosható. Kézzel nyomkodja ki a vizet.

Mindkét esetben szobahőmérsékleten, hőforrástól távol hagyja megszáradni.

Ha a terméket nem viselik, vízszintesen kell tárolni zárt tépőzárakkal. A mosásra és ápolásra vonatkozó részletes utasításokat szimbólumok formájában megtalálják a termék címkéjén és természetesen a használati útmutatójában.

SZOLGÁLTATÁS

A mi feladatunk: a páciens biztonságos ellátása megfelelő, hordható és orvosi szempontból teljesen hatékony kompresszióval.

Célunk, hogy biztonságban érezze magát, mind a méretvétel, mind a termék átadása során, és meghibásodás vagy egyéb problémák esetén támogatást nyújtunk.

Elkötelezett munkatársaink örömmel látják el Önt tanáccsal minden olyan kérdésben, amely a megrendeléssel, az anyagok kiválasztásával vagy a méretvétellel kapcsolatos.

**Gyógyászati segédeszközök.
A kockázatokról olvassa el a használati
útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!**

THUASNE HUNGARY KFT.
1117 Budapest, Budafoki út 60.
Tel.: + 36 1 209 9131, Fax.: + 36 1 209 1143
E-mail: thuasne@thuasne.hu

**www.thuasne.com
www.med-pont.hu**

TM1343202BDD_03180225

Fenntartjuk a katalógusban megjelenített termékek előzetes bejelentés nélkül történő megváltoztatásának jogát, megrendeléskor kérje visszaigazolásunkat. A képek illusztrációk.
Az egyes termékek elérhetőségével kapcsolatban érdeklődjön az adott ország forgalmazójánál.

