



THUASNE®



Osteo-med Acut

Gerincortézis

osteoporosis eredetű csigolyatörésre

Osteo-med Acut

Cikkszám: T54880

Méret: egységes

Szín: szürke

TB támogatott termék

Az Osteo-med Acut osteoporosis ortézis a gerincoszlop kiegyenesítő ortézisek közé tartozik. Az ortézis **stabilizálja a sérült, összezsugorodott csigolyatesteket**, valamint az egész gerincoszlopot a felső mellkasi csigolyatestektől egészen a keresztcsont tájáéig.

A gerincoszlopot aktívan kiegyenesíti és csökkenti a fájdalmat. Nyílrányú síkban korlátozza a mozgást.



INDIKÁCIÓ:

Osteoporosis eredetű csigolyatörést követő rehabilitációban.

FŐBB JELLEMZŐK:

Kényelmes viselet: Tökéletesen illeszkedik a páciens testéhez. Speciális alumínium sín a háton végigfutó zárt zsebben rejtve, a kényelmet az extra puha bélés biztosítja.

Állítható: Könnyen alkalmazkodik a páciens méretéhez és alakjához, állítható magasságú, a beteg görbületeihez igazítható, a kiegészítő pántok méretre vághatók.

Testtartás-javítás: A magasságban állítható hátkiegyenesítő a páciens görbületeihez igazítható.

Könnyű alkalmazhatóság: Ergonómikus ujjbújtatók, egyszerű pántrendszer.

Adaptálás



Derékméret,
háthosszúság lemérése



Hátsín hosszának beállítása
és becsúsztatás a zsebbe



Derékméret
beállítása

Felvétel (páciens által)

Vegye fel az ortézist a hátizsáknál megszokott módon.

Nyissa szét a nagy elülső tépőzáras részt.

Jobb és bal kezével nyúljon be az elülső kézbújtatókba, és a tépőzár mindkét felét zárja le.

Figyelje meg a hátsín illeszkedését, ennek pontosan hozzá kell simulnia az Ön gerincoszlopához.



Thuasne Hungary Kft.

CÍM: 1117 Budapest, Budafoki út 60.

TELEFON: +36 1 209 1143

WEBOLDAL: www.thuasne.hu

E-MAIL: thuasne@thuasne.hu

Thuasne Márkaboltok

THUASNE MED-PONT ERZSÉBET – Osteo-med Acut adaptáció

1073 Budapest, Erzsébet krt. 15.

E-MAIL: erzsebetkrt@med-pont.hu

TEL: +36 1 322 2356

THUASNE MED-PONT ALLEE:

1117 Budapest, Október 23. u. 8-10.

E-MAIL: allee@med-pont.hu

TEL: +36 1 279 0830

Utolsó aktualizálás időpontja: 2024.08.13.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!