



THUASNE®

BIFLEX Self Adjust

Állítható kompressziós eszköz
a felső és az alsó végtagokra

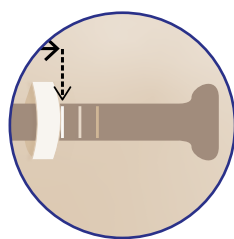


BIFLEX Self Adjust

Állítható kompressziós eszköz a felső és az alsó végtagokra

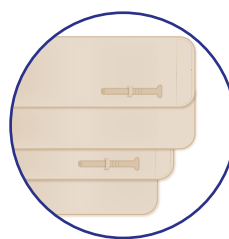
Használata javasolt vénás, nyirokeredetű vagy sérülés által okozott ödéma kezelésére, valamint a krónikus vénás elégtelenség és a lipödéma tüneti kezelésére.

Biztosítja a legalább 20–40 Hgmm nyomásszintet az alsó végtagon és a 20–30 Hgmm nyomásszintet a felső végtagon, valamint lehetővé teszi az eszköz azonos nyomáserősségre történő újbóli beállítását.*



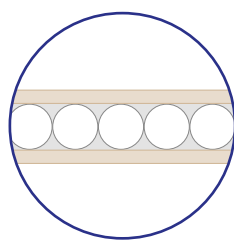
Integrált rendszer a nyomáserősség szabályozására az alsó végtagon (lábszár és comb eszközökön).

Befedi a teljes végtagot az ödéma továbbterjedésének megakadályozása érdekében.



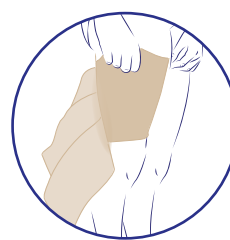
A pántok átfedik egymást, ellentétes irányú rögzítéssel.

Az anyag biztosítja a nedvességelvezetést*



Nyitott cellás habszivacs belső réteg.

Könnyű fel- és levétel



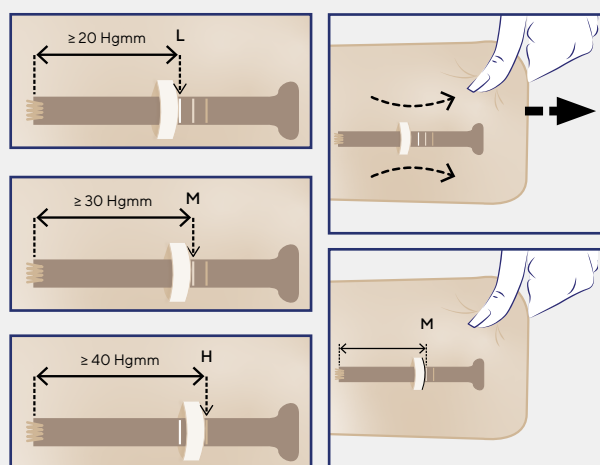
Integrált körharsnya a vádli, a comb és a kar bebújtatásához.

Hogyan kell használni a nyomáserősség szabályozót?

A szabályozóval 3 nyomásszintet lehet beállítani: **L** alacsony (világoskék vonal), **M** közepes (kék vonal) és **H** magas (sötétkék vonal).

A nyomást a pánt meghúzásával lehet beállítani, a pánt megfeszítésekor addig kell csúszni hagyni a beállító fület, amíg el nem érjük a beállítani kívánt nyomáserősséget. Az eszköz felvételekor és a viselés során ügyeljen arra, hogy ne legyenek rajta nagyobb gyűrődések.

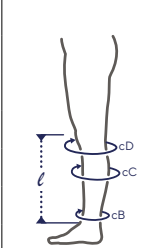
Szükség esetén egy-egy szakasz nyomáserőssége a pántok alulról felfelé történő állításával módosítható.



* Vizsgálati eljárás és eredmények – nyomásbeállítás, belső kutatás-fejlesztés 2022. november
** Légáteresztő teszt IFTH 2023. január

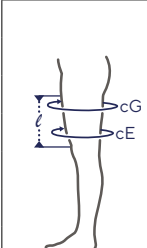
Vádli

ℓ	Boka-térd távolság
cB	Bokakörméret (a legkeskenyebb ponton)
cC	Vádlíkörméret (a legszélesebb ponton)
cD	Körméret a térd alatt
N	Hosszúság: Normál - $\ell < 36$ cm/ 14"
L	Hosszúság: Hosszú - $\ell > 36$ cm/ 14"

		cB	cC	cD
	1	16 - 24 cm 6.5 - 9.5"	24 - 35 cm 9.5 - 14"	25 - 36 cm 10 - 14"
	2	20 - 28 cm 8 - 11"	32 - 43 cm 12.5 - 17"	32 - 43 cm 12.5 - 17"
	3	24 - 32 cm 9.5 - 12.5"	40 - 51 cm 15.5 - 20"	39 - 50 cm 15.5 - 19.5"
	4	28 - 36 cm 11 - 14"	48 - 59 cm 19 - 23"	46 - 57 cm 18 - 22.5"

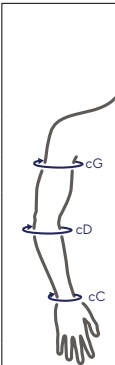
Comb

ℓ	Térd-comb távolság
cE	Körméret a térd felett
cG	Körméret a comb felső részén (a legszélesebb ponton)
N	Hosszúság: Normál - $\ell < 36$ cm/ 14"
L	Hosszúság: Hosszú - $\ell > 36$ cm/ 14"

		cE	cG
	1	34 - 45 cm 13.5 - 18"	46 - 57 cm 18 - 22.5"
	2	41 - 53 cm 16 - 21"	53 - 65 cm 21 - 25.5"
	3	49 - 60 cm 19.5 - 23.5"	61 - 72 cm 24 - 28.5"
	4	56 - 68 cm 22 - 27"	68 - 80 cm 26.5 - 31.5"

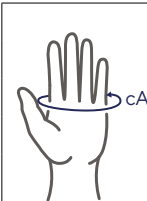
Kar

cG	A kar hónaljban mért körmérete
cD	Alkarkörméret (legszélesebb ponton)
cC	Csukló körméret

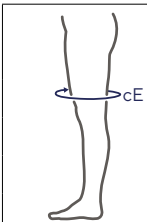
		cG	cD	cC
	1	25 - 32 cm 10 - 12.5"	22 - 28 cm 9 - 11"	15 - 19 cm 6 - 7.5"
	2	29 - 36 cm 11.5 - 14"	24 - 30 cm 9.5 - 12"	16 - 20 cm 6.5 - 8"
	3	33 - 40 cm 13 - 15.5"	26 - 32 cm 10 - 12.5"	17 - 21 cm 6.5 - 8"
	4	37 - 44 cm 14.5 - 17.5"	28 - 34 cm 11 - 13.5"	17 - 21 cm 6.5 - 8"
	5	41 - 48 cm 16 - 19"	30 - 36 cm 12 - 14"	18 - 22 cm 7 - 8.5"
	6	45 - 52 cm 18 - 20.5"	31 - 37 cm 12.5 - 14.5"	19 - 23 cm 7.5 - 9"

Kéz

cA	Kézkörméret
----	-------------

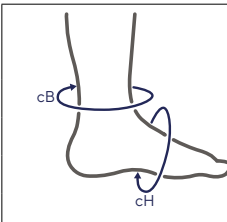
		cA
	1	14 - 19 cm 5.5 - 7.5"
	2	19 - 24 cm 7.5 - 9.5"
	3	24 - 29 cm 9.5 - 11.5"

Térd

		cE
	1	35 - 50 cm 14 - 19.5"
	2	50 - 65 cm 19.5 - 25.5"
	3	65 - 85 cm 25.5 - 33.5"

cE	Körméret a térd felett
----	------------------------

Lábfej

		cB	cH
	1	< 36 cm < 14"	19 - 24 cm 7.5 - 9.5"
	2	< 36 cm < 14"	24 - 29 cm 9.5 - 11.5"
	3	< 41 cm < 16"	29 - 34 cm 11.5 - 13.5"

cB	Bokakörméret
cH	Lábfejkörméret

WINGS
FOR YOUR HEALTH

BIFLEX Self Adjust

Állítható kompressziós eszköz
a felső és az alsó végtagokra

Thuasne Hungary Kft.

1117 Budapest, Budafoki út 60.

Tel: +36 1 209 1143

E-mail: thuasne@thuasne.hu

www.thuasne.hu

www.med-pont.hu

A Biflex Self Adjust orvostechnikai eszköz.
A dokumentumban említett összes termék I. osztályba sorolt orvostechnikai eszköz, amely CE-jelöléssel rendelkezik az orvostechnikai eszközökről szóló 2017/745 európai rendelet szerint. Kérjük, figyelmesen olvassa el a termék használati utasítását, javallatait és ellenjavallatait.
Photos: Studio Caterin. Ref.: 2306219 (06/2023).



THUASNE

120 rue Marius Auphan
92300 Levallois-Perret Cedex - France

Thuasne SAS – SIREN/RCS Nanterre 542 091 186 – Capital 1 950 000 euros – 120, rue Marius Auphan
92300 Levallois-Perret (France)

ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖK.
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT,
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!