


(MOBIDERM *autofit*) karharisnya a fenntartó fázisban

HATÉKONYSÁGI EREDMÉNYEK:

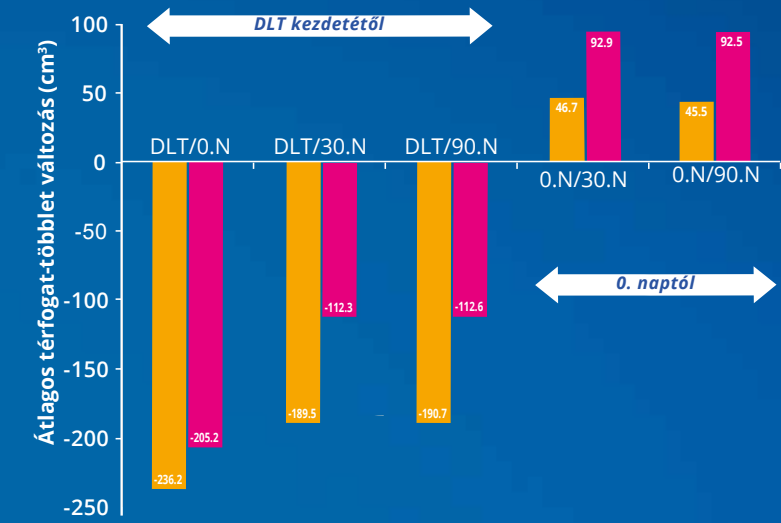


Átlagos térfogat-többletváltozás (cm³)

• Térfogattöbblet vált. 0.N/30.N (%): 1,80 az I. csoport-nál, míg 3,20 a II. csoport-ban (NS)

• A 30. napon, a DLT hatásának 85%-a maradt fenn az I. csoport-nál, míg a II. csoport-nál csak 54%.

I. csoport
II. csoport

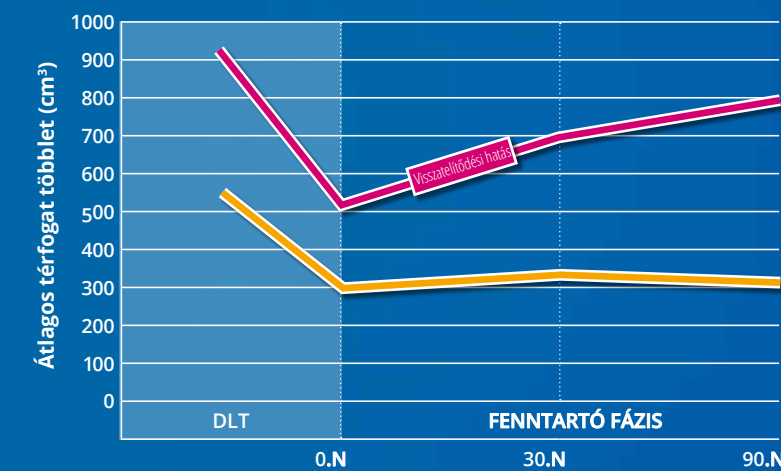

Térfogat eltérések a magas válaszképpő pácienseknél (cm³)

• A **MOBIDERM *autofit*** előnye még hangsúlyosabb azon DLT kezelt páciensek körében, akiknél magas válaszképpőt figyeltek meg (35% veszteség a DLT-Polit tanulmány során...)

I. csoport
II. csoport

KÖVETKEZTETÉS:

Az elsődleges kritérium eredményei arra engednek következtetni, hogy a **MOBIDERM *autofit*** a DLT kezelést követően csökkenti a nyirokódéma visszatelítődésének hajlamát, különösen a DLT során erős válaszképpő pácienseknél. A 30. és 90. nap közötti vizsgálati időszakban, amikor 40 páciens viselte a vizsgált gyógyászati segédeszközt, a nyirokódéma térfogatának stabilizálódása figyelhető meg.

A **MOBIDERM *autofit*** karharisnya értékes előnyöket nyújthat a krónikus betegségben szenvedő páciensek ápolóktól és rokonoktól való függésének enyhítésében, míg jó együttműködést biztosít a fenntartó kezelés során.

A **MOBIDERM *autofit*** éjszakai karharisnya a napközbeni kompresszió mellett előnyt biztosít a páciensnek a nyirokódéma kezelés fenntartó szakaszában és növeli a páciens függetlenségét.




A MOBIDERM ESZKÖZRŐL

A **MOBIDERM** egy-két nem-szőtt fásli közé helyezett habszivacs kockákból álló segédeszköz. A **MOBIDERM** technológia csökkentő fásli alatt alkalmazható (fásli vagy mobilizáló lap formájában), vagy mobilizáló ruhákba építjük be.

A habszivacs darabkák és környezetük között alakuló nyomáskülönbségnek köszönhetően javítja a nyirokfolyadék áramlását és optimalizálja az elvezetést.

Az ödémás bőr alatti kötőszövetre gyakorolt nyíróerők által a **MOBIDERM** fel is puhítja a fibrotikus és szklerotikus területeket.

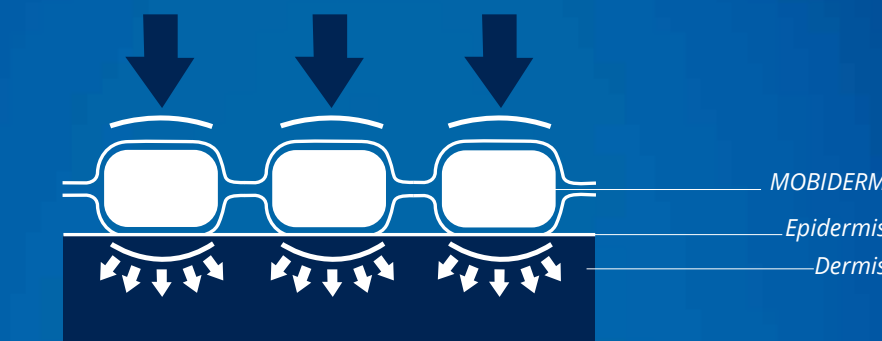

A MOBIDERM EGY HIGH-TECH ÖDÉMACSÖKKENTŐ KOMPRESSZIÓS ESZKÖZ

PATENTED DEVICE



• HATÉKONYSÁG

- az ödéma térfogatának gyors csökkentése,
- a fibrotikus, szklerotikus vagy ödémás bőr felpuhítása.

• PRAKTIKUSSÁG

- könnyű, kényelmes és rugalmas, biztosítja a mozgás szabadságát a páciens számára, ezáltal növeli a végtag nyirokelvezetési képességét.

• KÉNYELEM

- puha érintkezés a bőrrel,
- alkalmazkodás az anatómiai formákhoz.

THUASNE SAS

120, Rue Marius Auphan - CS10032 - 92309 Levallois-Perret Cedex - France
e-mail : sales.export@thuasne.fr

www.thuasne.biz



MOBIDERM *autofit*

A páciens önállóságát elősegítő NYIROKÖDÉMA MEGOLDÁSOK



Önszabályozható éjszakai kompresszió szerepe a felső végtag nyirokódémájában

S. Mestre^{1,2} & C. Calais¹ & G. Gaillard¹ & M. Nou¹ & M. Pasqualini³ & C. Ben Amor³ & I. Quere^{1,2,4}
Supportive Care in Cancer - DOI 10.1007/s00520-017-3652-5

1, Bel- és érgyógyászati osztály, Hôpital St-Eloi, Montpellier, France
2, Érendszerei interface rendellenességek női sajátosságainak laboratóriuma EA2992, University of Montpellier and Nîmes, France
3, THUASNE, Levallois-Perret, France - 4, Klinikai Kutató Központ, INSERM CIC 1001, Montpellier, France

BEMUTATKOZÁS:

Azon betegek esetében, akiknél a mellrák következtében másodlagos nyirokódéma (BCSL) alakult ki, a nyirokódéma visszatelítődése figyelhető meg a nyirokódéma csökkentő terápiát (DLT) követően. A hosszútávú nyirokódéma kezelések sikeressége a páciens együttműködésén múlik.

CÉL:


A koncepció bizonyító tanulmány fő célja a **MOBIDERM *autofit***, mint éjszakai kezelésszköz hatékonyságának és biztonságosságának felmérése a DLT-t követő fenntartó fázis során a nappali Thuasne nyirokódéma kezelő kompressziós eszközök használata mellett.



EREDMÉNYEK:

Populáció leírás (években)

- Átlag életkor : **67**
- Átlagosan eltelt idő a mellrák diagnózisa óta: **11**
- Átlagosan eltelt idő a nyirokódéma diagnózisa óta: **7**
- Nyirokódéma stádiumai: **II, III**

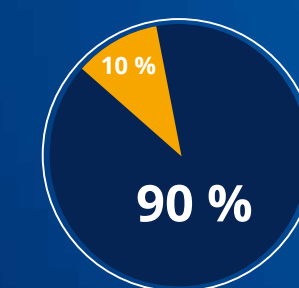

EGYÜTTMŰKÖDÉSI EREDMÉNYEK:

Milyen gyakran viselte a **MOBIDERM *autofit***-et a tanulmány során? (I. és II. csoportban)

A páciensek **90%-a** minden éjjel viselte.

Minden éjjel
Heti 4-6 alkalommal

ELÉGEDETTSÉGI MUTATÓK*:

Milyennek értékeli a **MOBIDERM *autofit***-et?

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| Könnyű / nagyon könnyű felvenni | → 70 % of patients |
| Gyors a felvétele | → 85 % of patients |
| Hasznos az önszabályozás | → 89 % of patients |
| Könnyű / nagyon könnyű levenni | → 98 % of patients |
| Kényelmes | → 90 % of patients |

A már kompressziót használó betegek **82 %-a** előnyben részesíti a

MOBIDERM *autofit*

* A betegkérdőívet minden tanulmányba bevett páciens kitöltötte a tanulmány végén.

MOBIDERM autofit

A **MOBIDERM standard**, önszabályozó karharisnya, mely hozzáigazítható minden páciens egyedi morfológiájához és annak változásaihoz az idő múlásával.

LEÍRÁS:

- A felső végtag nyirokódémája esetén: **MOBIDERM autofit** önszabályozható karharisnya, ujjatlan kesztyűvel és hüvelykujjal
- Az alsó végtag nyirokódémája esetén: **MOBIDERM autofit** önszabályozható zokni vagy combfix

KINEK AJÁNLOTT?

- A nyirokódéma minden szakaszában.
- A fenntartó vagy csökkentő fázis végén használható.
- Olyan betegeknek, akiknél deformáció vagy progresszív ödéma jelentkezik.
- Azoknál a betegeknek, akik szeretnék az ödémát saját maguk szabályozni.
- Olyan betegek esetében, akiknek azonnal szükségük van a termékre.

FŐ ÖSSZETEVŐK:


- A ruházat külső rétegei: 59% poliamid, 41% elasztán
- Mobiderm a karon / lábbon: tapadó, nem szőtt poliuretán hab (15 x 15mm kocka)
- Mobiderm kéz / lábfej: tapadó, nem szőtt polietilén hab (5 x 5 mm kocka)



MÉRETSOROZATOS
TERMÉKEK:
GYORS ELLÁTÁS!

FELSŐ VÉGTAG: KARHARISNYA

PATENTED
DEVICE

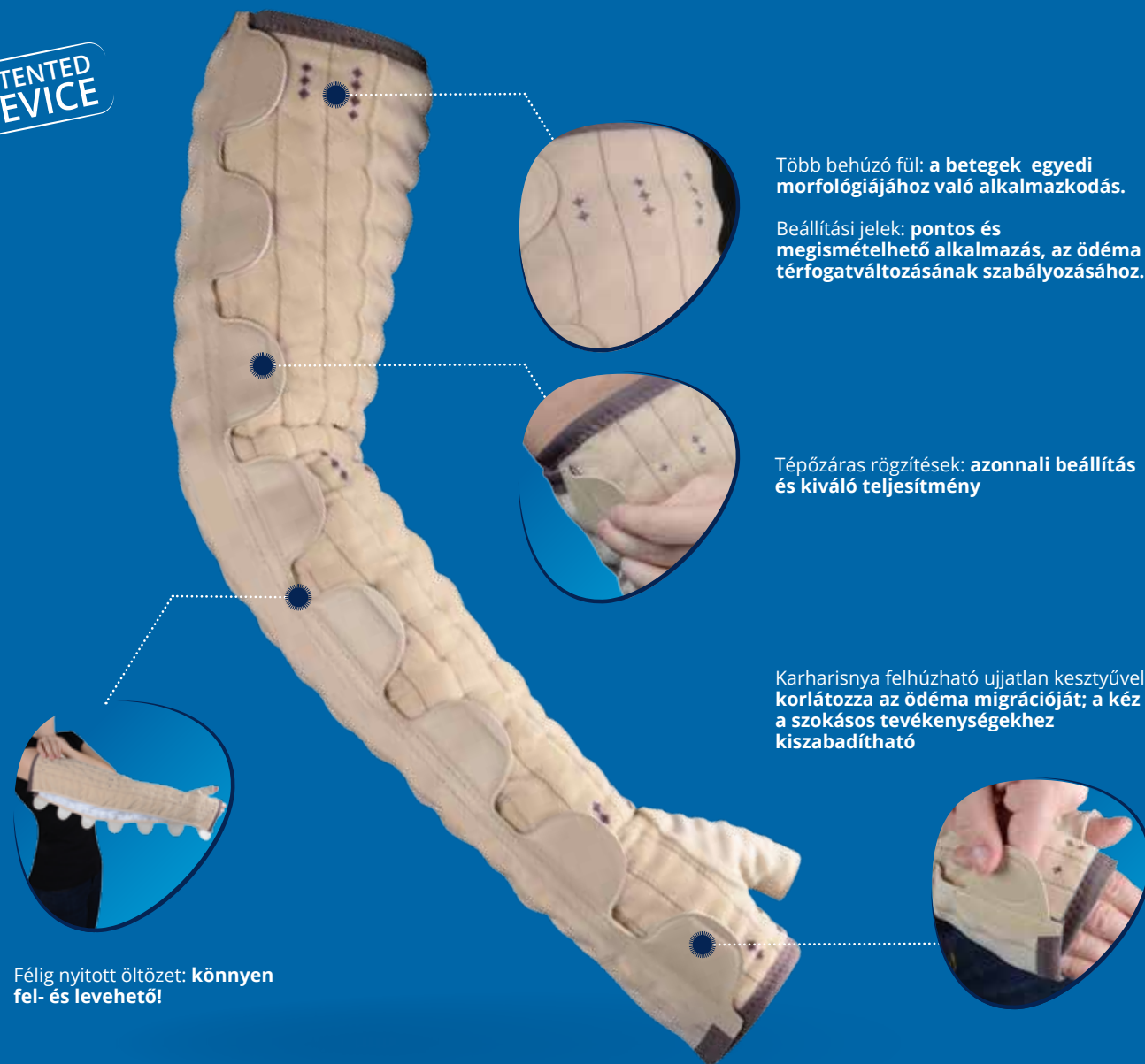

Több behúzó fül: a betegek egyedi morfológiájához való alkalmazkodás.

Beállítási jelek: pontos és megismételhető alkalmazás, az ödéma térfogatváltozásának szabályozásához.

Tépőzárás rögzítések: azonnali beállítás és kiváló teljesítmény

Karharisnya felhúzható ujjatlan kesztyűvel: korlátozza az ödéma migrációját; a kéz a szokásos tevékenységekhez kiszabadítható

Félig nyitott öltözet: könnyen fel- és levezhető!

ALSÓ VÉGTAG: ZOKNI VAGY COMBFIX

PATENTED
DEVICE



Félig nyitott öltözet: könnyen fel- és levezhető!

Több behúzó fül: a betegek egyedi morfológiájához való alkalmazkodás.

Beállítási jelek: pontos és megismételhető alkalmazás, az ödéma térfogatváltozásának szabályozásához

Tépőzárás rögzítések: azonnali beállítás és kiváló teljesítmény

Csúszásgátló talp: megakadályozza az elcsúszást járás közben

Duplasoros: széles adaptálási tartomány, lehetővé teszi az illesztést mindkét lábra

ZOKNI

MOBIDERM autofit ZOKNI							
	Boka körméret (b)	Vádli körméret (c)	Térd körméret (d)	Termékkódok (egységes jobb/bal)			
				Rövid ℓ (D): 38 - 40 cm	Normál ℓ (D): 40 - 42 cm	Hosszú ℓ (D): 42 - 44 cm	Xtra hosszú ℓ (D): 44 - 46 cm
T1	16-24	24-35	25-36	37340120100231	37340120100232	37340120100233	37340120100234
T2	20-28	32-43	32-43	37340120200231	37340120200232	37340120200233	37340120200234
T3	24-32	40-51	39-50	37340120300231	37340120300232	37340120300233	37340120300234
T4	28-36	48-59	46-57	37340120400231	37340120400232	37340120400233	37340120400234

COMBFIX

MOBIDERM autofit COMBFIX							
	Boka körméret (b)	Vádli körméret (c)	Comb körméret (d)	Termékkódok (egységes jobb/bal)			
				Rövid ℓ (G): 67 - 72 cm	Normál ℓ (G): 72 - 77 cm	Hosszú ℓ (G): 77 - 82 cm	Xtra hosszú ℓ (G): 82 - 87 cm
T1	16-24	24-35	46-57	37350120100231	37350120100232	37350120100233	37350120100234
T2	20-28	32-43	53-65	37350120200231	37350120200232	37350120200233	37350120200234
T3	24-32	40-51	61-72	37350120300231	37350120300232	37350120300233	37350120300234
T4	28-36	48-59	68-80	37350120400231	37350120400232	37350120400233	37350120400234

MOBIDERM autofit

MOSÁSI ÚTMUTATÓ

Mosás előtt zárja össze a tépőzárás pántokat.

Két mosási lehetőség áll rendelkezésre:

- Kézzel:** hideg, szappanos vízbe áztassa be a terméket, tiszta szivaccsal dörzsölje meg, majd nyomkodja ki a felesleges vizet.
- Géppel:** használja a gyapjú programot alacsony hőmérsékleten, és használjon mosózsákot. Nyomkodja ki kézzel a vizet

Mindkét esetben hagyja megszáradni a terméket, közvetlen hőforrástól távol.

Ha az öltözetet nem hordja, tartsa lehetőleg fektetett állapotban, zárt tépőzárral. Ha össze kell hajtani, helyezze a füleket kívülre.



Anatómiai referenciapontok:

B : Boka körméret (a legkeskenyebb részen)

C : Vádli körméret (a legszélesebb részen)

D : Térd alatti körméret (a szárapocscsont fejenél)

G : Comb körméret (a legszélesebb részen)

ℓ D : A térd talajtól mért távolsága (a zoknihoz - a méretet a térdhajlat alatt, hátul kell venni)

ℓ G : A comb talajtól mért távolsága (a combfixhez - a méretet a fenékajlatnál kell venni)

